




1. Sprawdź urządzenie



Sprawdź integralność sterylnej opakowania. Wstrzyknij płyn (maks. 10 ml), aby sprawdzić szczelność balonu, a następnie usuń płyn.

2. Zmierz wielkość macicy

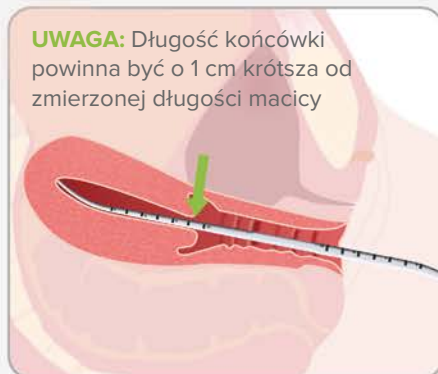

UWAGA: Długość końcówki powinna być o 1 cm krótsza od zmierzonej długości macicy

Określ długość macicy, wybierz odpowiedni rozmiar końcówki.

3. Załóż nakładkę *




UWAGA: Dociśnij, aż nakładka „kliknie” po znalezieniu się w odpowiednim miejscu.

W razie potrzeby zamocuj nakładkę 1 cm.

*opcjonalnie


4. Włóż narzędzie

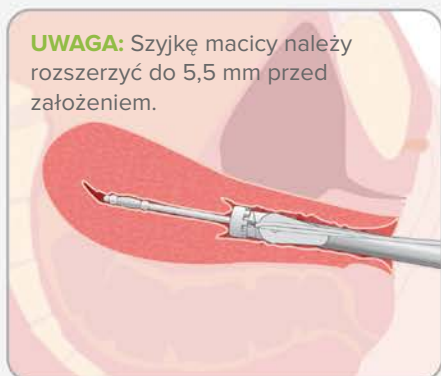

UWAGA: Szyjkę macicy należy rozszerzyć do 5,5 mm przed założeniem.


Zwilż końcówkę dystalną, włóż do jamy macicy, aż nakładka oprze się o ujście zewnętrzne szyjki macicy.

5. Napełnij balon

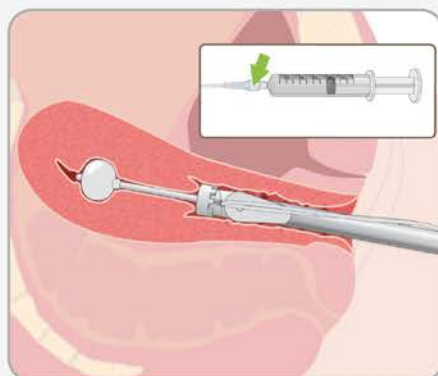

Powoli wstrzyknij płyn (maks. 10 ml) do balonu, aż urządzenie zostanie mocno dociśnięte do szyjki macicy.

6. Obróć uchwyt sterujący

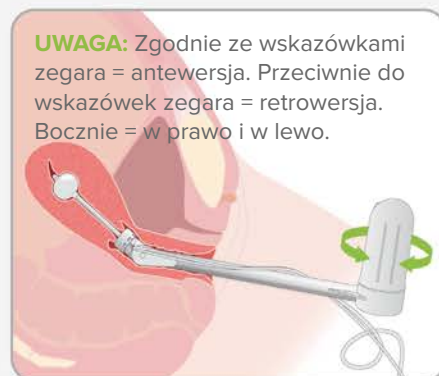

UWAGA: Zgodnie ze wskazówkami zegara = antewersja. Przeciwie do wskazówek zegara = retrowersja. Bocznie = w prawo i w lewo.

Obracaj rękojeść, aby manipulować macicą.

7. Usuń i wyrzuć



UWAGA: Sprawdź, czy urządzenie i nakładka (jeśli była użyta) są nienaruszone.

Usuń płyn z balonu, ustaw macicę w naturalnej pozycji, wyjmij urządzenie i wyrzuć.

Pełne instrukcje, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania znajdują się w instrukcji obsługi.



Kroki 1 i 2 są takie same jak w skróconej instrukcji obsługi ClearView

3. Załóż nakładkę*


UWAGA: Przesuń w dół wzdłuż wgłębienia, a następnie obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.



*W razie potrzeby nałóż nakładkę 1 cm.

4. Załóż kielich kolpotomijny


UWAGA: Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.

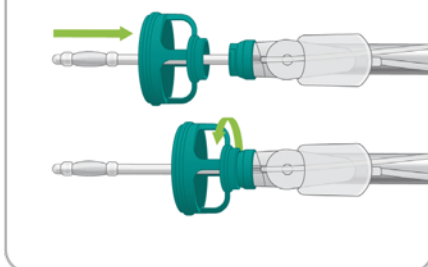

Wybierz kielich o odpowiednim rozmiarze, przymocuj kielich do nakładki (jeśli została użyta) lub wzmocnienia końcówki.


5. Włóż narzędzie

UWAGA: Szyjkę macicy należy rozszerzyć do 5,5 mm przed założeniem. Do założenia można zastosować retraktory, wziernik i szczypce

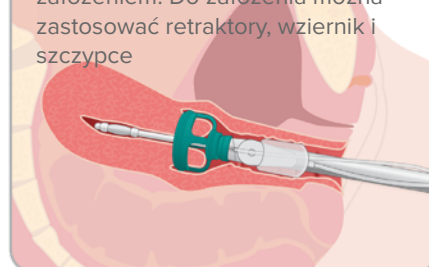

Zwilż dystalną końcówkę, włóż do jamy macicy, aż nakładka oprze się o ujście zewnętrzne szyjki macicy.


6. Napełnij balon

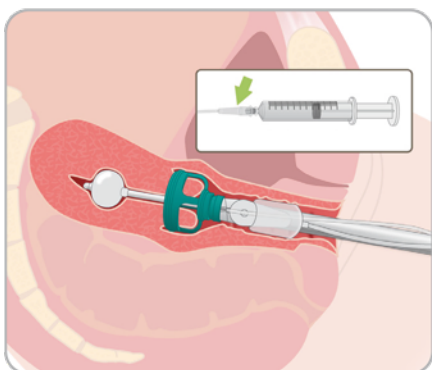

Powoli wstrzyknij płyn (maks. 10 ml) do balonu, aż urządzenie zostanie mocno docięnięte do szyjki macicy.


7. Obróć uchwyt sterujący

UWAGA: Zgodnie z wskazówkami zegara = antewersja. Przeciwnie do wskazówek zegara = retrowersja. Bocznie = w prawo i w lewo.

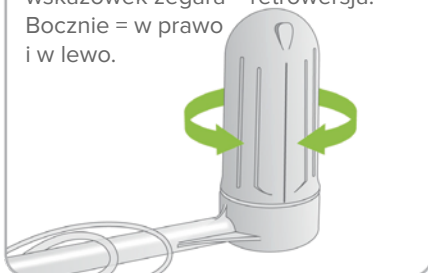


Obracaj rękojeść, aby manipulować macicą.

8. Napełnij balon okluzyjny

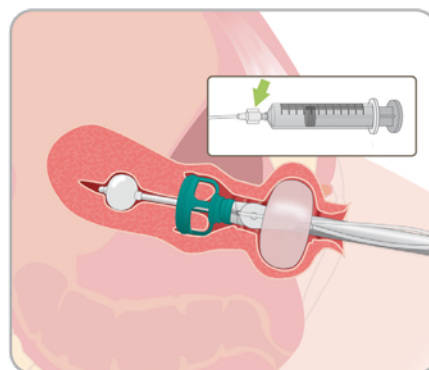

Przed kolpotomią umieść balon okluzyjny w pochwie. Wstrzyknij 60–120 ml płynu.

9. Nacięcie macicy

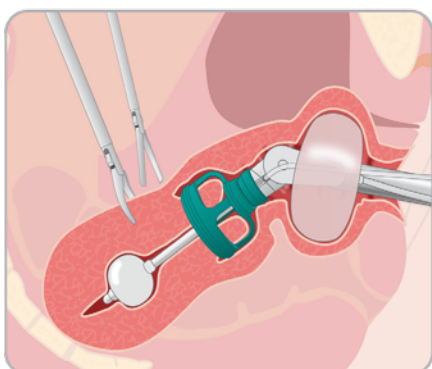

Wykonaj nacięcie macicy. **Używaj** kielicha jako wizualny obrys tkanki. **Nie używaj** kielicha jako podparcia dla instrumentów.

10. Usuń i wyrzuć

UWAGA: Sprawdź, czy urządzenie i nakładka (jeśli była użyta) są nienaruszone.



Usuń płyn z balonu, ustaw macicę w naturalnej pozycji, wyjmij urządzenie i wyrzuć.

Pełne instrukcje, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania znajdują się w instrukcji obsługi.