



Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej **emFieldPro**. Zabiegi z wykorzystaniem wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, oprócz efektywnej redukcji bólu, zmniejszają napięcie mięśniowe, wspomagają cyrkulację krwi i aktywują procesy regeneracyjne organizmu. Terapia wyróżnia się wszechstronnością zastosowań oraz małą ilością przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu.



Wysokoenergetyczna terapia indukcyjna

Ból to jeden z najczęściej odczuwanych problemów zdrowotnych na świecie. Firma Zimmer, dzięki zastosowaniu innowacyjnej wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, wprowadza nowy standard w terapii redukcji bólu. Zabiegi z wykorzystaniem wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, oprócz efektywnej redukcji bólu, minimalizują napięcie mięśniowe, wspomagają cyrkulację krwi i aktywują procesy regeneracyjne.

Zabiegi z emFieldPro:

Terapia skojarzona – statyczna i dynamiczna

Ból zazwyczaj nie rozkłada się równomiernie. Przy wielu zespołach bólowych punkty maksymalnego odczucia bólu, takie jak punkty spustowe i punkty bólu, znajdują się w bolesnym regionie. Na punkty spustowe i główne punkty bólowe stosuje się terapię statyczną, natomiast na pozostałe obszary terapię dynamiczną. W przypadku leczenia skojarzonego należy najpierw zastosować terapię statyczną (na punkty bólu i spustowe), a następnie kontynuować zabieg terapią dynamiczną.

Terapia statyczna

Do terapii statycznej powinien zostać użyty duży aplikator, zamocowany na ramieniu. Przed zabiegiem należy wymasować punkty bólowe i spustowe, a później zastosować terapię statyczną z zadaną mocą wyjściową. Dzięki temu każdy punkt bólowy oraz spustowy zostanie objęty leczeniem. Należy pamiętać, że punkty spustowe mogą znajdować się poza obszarem odczuwania bólu.

Terapia dynamiczna

Do terapii dynamicznej należy stosować średniej wielkości aplikator. Jego bezpośredni kontakt ze skórą nie jest konieczny, skóra jednak musi być sucha i oczyszczona. Przed rozpoczęciem leczenia trzeba wymasować obszar występowania bólu lub planowanego zabiegu. Należy zastosować zadaną moc wyjściową i upewnić się, że aplikacja objęła cały leczony obszar.

Moc i czas zabiegu

Maksymalna wyemitowana dawka energii nie może być wyższa niż wskazana w rekomendacjach zabiegowych. Nie wolno stosować energii wyższej niż taka, którą może znieść pacjent. Minimalna ilość zabiegów to dwie sesje w tygodniu.

Wskazania kliniczne:

- ból odcinka szyjnego,
- zamrożony bark,
- syndrom cieśni nadgarstka,
- bóle odcinka lędźwiowego,
- rwa kulszowa,
- bóle miednicy,
- tendinopatia więzadła rzepki,
- reumatoidalne zapalenie stawów,
- leczenie złamań,
- regeneracja nerwów.



Dane techniczne:

Moc magnetyczna [tesle]:	3 (duży aplikator), 2,5 (średni aplikator)
Ilość kanałów:	2
Częstotliwość [Hz]:	10-100
Protokoły zabiegowe:	20 programów, 20 ulubionych, 20 programów w trybie eksperta
Czas zabiegu [min]:	1-60
Wyświetlacz LCD:	8", dotykowy, centralny przycisk sterujący
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	54,2 x 50,1 x 99,3
Waga [kg]:	ok. 60

