

## SALUS TALENT

Głęboka stymulacja  
elektromagnetyczna



### Wskazania:

- Schorzenia kręgosłupa:
  - Ostry/ przewlekły ból odcinka C, Th, L-S (lumbago)
  - Rwa kulszowa
  - Zmiany zwyrodnieniowe kręgów (spondyloza)
- Zaburzenia w obrębie układu mięśniowo- szkieletowego:
  - Bark zamrożony (ograniczenie ruchomości spowodowane zmianami zapalnymi lub zwyrodnieniowymi)
  - Zwyrodnienia stawów
  - Reumatoidalne zapalenie stawów
- Uszkodzenie nerwów obwodowych
- Osłabienie lub zanik mięśni
- Stany pourazowe
- Zaburzenia układu moczowo-płciowego:
  - Ból prostaty
  - Nietrzymanie moczu
  - Dysfunkcje seksualne
  - Regeneracja poporodowa
  - Wzmocnienie mięśni dna miednicy
  - Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego

### Działanie:

- Indukcja magnetyczna 2,5 Tesli
- Częstotliwość 50 Hz
- Głęboka penetracja do 10 cm
- Odziaływanie na mięśnie, układ nerwowy oraz układ krwionośny
- Stymulacja głęboko położonych nerwów obwodowych oraz pobudzenie mięśni, usprawnienie krążenia

### Przeciwwskazania:

- Cięża i okres karmienia
- Podwyższona temperatura ciała
- Aktywne nowotwory
- Obecność rozrusznika serca, pompy insulinowej metalowych implantów
- Ciężka, nieustabilizowana niewydolność układu krążenia
- Okolice serca
- Wkładka domaciczna
- Zaawansowana miażdżycza tętnic
- Osteoporoza
- Zaburzenia czucia
- Żylaki w miejscu zabiegowym
- Implanty metalowe, akrylowe, polietylenowe w miejscu zabiegowym
- Choroby infekcyjne
- Rozrusznik serca
- Endoproteza stawu w miejscu zabiegowym (endoproteza tytanowa nie jest przeciwwskazaniem)

### Przykładowa terapia w schorzeniach uroinekologicznych:

- Programy manualne: M1, M2, M3, M4
- Czas zabiegu: 20 min
- Do 3 zabiegów w ciągu 1 tygodnia
- Cała seria zabiegów: 3-5 tygodni
- Czas impulsu: 3s
- Czas przerwy: 6s






## Przeprowadzenie zabiegu:

- Cewkę przykładamy bezpośrednio do ciała - najsilniejsze oddziaływanie pola ma miejsce w centralnej części cewki
- 6-10 (max. do 12) zabiegów
- 2-3 razy tygodniowo
- Czas trwania zabiegu: 1-15 min / zabiegi z wykorzystaniem fotela: 20-30 min
- Rozpoczynamy od programu A2 (Auto 2)
- Ustawienia indukcji:
  - 100% = 2,5 Tesli
  - W kolejnych zabiegach można zwiększyć wartość indukcji
  - Poziom wyraźnie odczuwalny, ale nie bolesny dla pacjenta
  - Pacjent powinien odczuwać mrowienie i wibracje bądź wyraźny skurcz mięśnia
- Zabieg na fotelu URO w lekkim odzieniu

## Programy terapeutyczne:


### AUTO 1

Zaleca się stosowanie programu AUTO 1 w przypadku leczenia ostrych stadiów, szyjnego odcinka kręgosłupa oraz stymulacji V oraz VII nerwu czaszkowego.

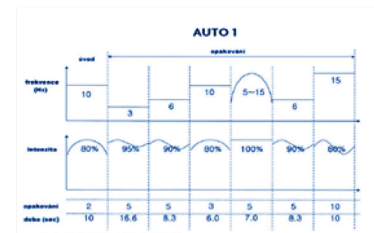

### AUTO 2

Program terapeutyczny AUTO 2 przeznaczony jest do leczenia między innymi większych stawów oraz piersiowego odcinka kręgosłupa.

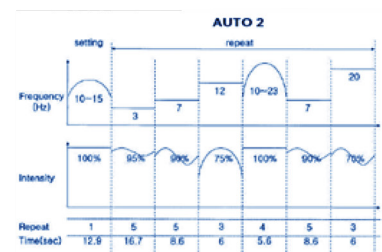

### AUTO 3 i AUTO 4

Programy AUTO 3 i 4 są stosowane między innymi w przypadku przewlekłego bólu, a także lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa. W zależności od odczuwanego bólu, programy należy stosować naprzemiennie.

