




Cechy charakterystyczne Bryza typ NPL2:

- wolnostojąca katedra sterownicza natrysku płaszczyznowego,
- dźwignia szybkiej zmiany temperatury wody, umożliwiająca przełączanie między ciepłą wodą z aparatu a zimną z instalacji,
- bateria termostatyczna o zwiększonej przepustowości do płynnej regulacji temperatury,
- zawór regulujący intensywność masażu (ciśnienie) i odcinający dopływ wody,
- zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia wody w instalacji,
- 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- termometr.

Cechy charakterystyczne Bryza typ NPLE:

- wolnostojąca katedra sterownicza natrysku płaszczyznowego,
- 2 baterie termostatyczne do płynnej regulacji temperatury, niezależnie dla wody ciepłej i zimnej,
- elektroniczny panel sterowania,
- czujnik temperatury,
- 2 elektrozawory umożliwiające szybką zmianę temperatury wody – przełączanie między ciepłą a zimną wodą z termostatów,
- katedra wymaga podłączenia do sieci elektrycznej,
- włącznik/wyłącznik urządzenia,
- ustawianie czasu zabiegu dla wody ciepłej (0-99 min),
- ustawianie czasu zabiegu dla wody zimnej (0-99 s),
- 3 programy standardowe, 4 programy użytkownika,
- zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia wody w instalacji,
- 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- pompa stabilizująca ciśnienie – stosowana w przypadku spadku ciśnienia w sieci (opcja).

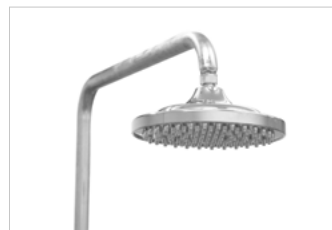

Kabina natryskowa **Bryza** przeznaczona do zabiegów wykorzystujących właściwości masujące strumienia wody oraz działanie temperaturą. Woda, pod dużym ciśnieniem, natryskiwana jest z odpowiednio rozmieszczonych dysz, równomiernie masując ciało pacjenta. Katedra sterownicza **Bryza** umożliwia kontrolę temperatury w zależności od czasu, dzięki czemu zabieg może mieć różnorodne działanie. Dużą popularnością cieszą się natryski naprzemienne, podczas których dochodzi do szybkich zmian temperatury wody (z ciepłej na zimną i odwrotnie).

Możliwości zabiegowe:

- Zimne i chłodne natryski - temperatura wody 10-20°C. Czas trwania natrysku od kilku sekund do minuty. Działają hartująco, pobudzają procesy przemiany materii i podwyższają ciśnienie krwi. Często stosowane na zakończenie ciepłych zabiegów wodoleczniczych, np.: kąpiele balneologicznych, sauny,
- Ciepłe natryski - temperatura wody 32-37°C. Czas trwania od 3-5 min. Zalecane w nerwicach, bezsenności i nerwobólach,
- Gorące natryski - temperatura wody 38-42°C. Czas trwania 5-10 min. Powodują pobudzenie procesów przemiany materii, wzrost wydzielania potu, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz spadek ciśnienia krwi, ogólne odprężenie i uspokojenie,
- Zimne-ciepłe natryski - temperatura wody 32-37°C przez ok. 1 min, potem 10-20°C przez ok. 30 s. Czas trwania ok. 5 min. Działają hartująco, odprężająco oraz pobudzają procesy przemiany materii.

Cechy charakterystyczne szkieletu natrysku:

- wykonany ze stali nierdzewnej,
- 2 niezależne strefy natrysku: 1 - deszczownica z góry, 2 - natrysk płaszczyznowy z boków,
- zawór spustowy umożliwiający usunięcie wody z całej instalacji,
- do używania natrysku niezbędna jest katedra sterownicza NPL2 lub NPLE.

Dane techniczne:

Ciśnienie wody ciepłej i zimnej [bar]:	4-6
Temperatura wody ciepłej (maks.) [°C]:	60
Zasilanie (typ NPLE) [V/Hz]:	230/50
Pobór prądu [A]:	4
Wymiary NPL2 (wys. x szer. x gł.) [cm]:	94 x 64 x 42
Wymiary NPLE (wys. x szer. x gł.) [cm]:	4 x 64 x 42
Wymiary szkieletu natrysku (wys. x szer. x gł.) [cm]:	215 x 87 x 80

