

Mieszalniki i cieplarka



Urządzenia do przygotowywania masy borowinowej, fango i parafiny do zabiegów ciepłolecniczych. Dzięki przemysłowej konstrukcji urządzenia te cechują się ekonomicznością, niezawodnością i łatwością użytkowania.

- F-40** - urządzenie do podgrzewania i mieszania masy fango-parafinowej,
F-40/B, B-85L, B-130L, B-200L - urządzenie do podgrzewania i mieszania masy borowinowej,
F-40/P - urządzenie do podgrzewania i mieszania masy parafinowej,
C-14 - urządzenie do podgrzewania i utrzymania przygotowanej masy fango w żądanym zakresie temperatury.

Elektroniczne sterowanie umożliwia programowanie funkcji:

- grzanie (F-40, F-40/P, F-40/B, B-85L, B-130L, B-200L): praca normalna w zakresie temperatury,
- mieszanie (F-40, F-40/P, F-40/B, B-85L, B-130L, B-200L): wymuszone mieszanie masy (przyśpieszony proces rozgrzewania dodawanej zimnej masy),
- sterylizacja (F-40, F-40/P): sterylizacja masy w przyjętym zakresie temperatury,
- start za (F-40, F-40/P, F-40/B, B-85L, B-130L, B-200L, C-14): opóźnienie uruchomienia urządzenia o zaprogramowaną liczbę godzin,
- praca stała (C-14): utrzymanie wybranej temperatury w komorze grzania (od +25 do +80 °C),
- cykl dobowy (C-14): ustawienie godziny włączenia i wyłączenia cieplarki.

Cechy charakterystyczne (F-40, F-40/P, F-40/B, B-85L, B-130L, B-200L):

- urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania masy,
- pilot umożliwiający zdalne sterowanie,
- sterowanie elektroniczne zapewniające ekonomiczne zużycie prądu oraz szybkie dogrzewanie masy,
- specjalnie ukształtowany mieszalnik rozdrabniający masę,
- parametry pracy urządzenia prezentowane są na dużych wyświetlaczach,
- regulacja temperatury,
- system utrzymywania zadanej temperatury zapobiegający przypalaniu masy,
- płaszcz olejowy (B-85L, B-130L i B-200L),
- precyzyjny pomiar temperatury masy borowinowej (B-85L, B-130L i B-200L).

Dane techniczne:

	F-40	F-40/P	F-40/B	B-85L	B-130L	B-200L	C-14
Zakres temperatur [°C]:	55-80	55-80	30-60	30-60	30-60	30-60	25-80
Pojemność robocza [l]:	40	40	40	85-	130	200	14 tac 40 x 60cm
Temperatura sterylizacji [°C]:	130	110	-	-	-	-	-
Zasilanie [V/Hz]:	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	230/50
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	75 x 66 x 74	75 x 66 x 64	75 x 66 x 64	120 x 76 x 97	132 x 86 x 99	132 x 97 x 109	80 x 70 x 76
Maksymalny pobór mocy [kW]:	2,3	2,3	2,3	3,3	3,3	3,6	2,3
Masa [kg]:	90	90	90	300	360	380	100



Cechy charakterystyczne C-14:

- 14 tac do przechowywania mas w ustalonej temperaturze,
- urządzenie ze stali zabezpieczonej przed rdzewieniem,
- może służyć jako podstawa do wszystkich wersji F-40,
- regulowana temperatura grzania 25-80°C,
- grzałka z wentylatorem termoo obiegu pozwala na równomierne utrzymywanie zadanej temperatury.

