


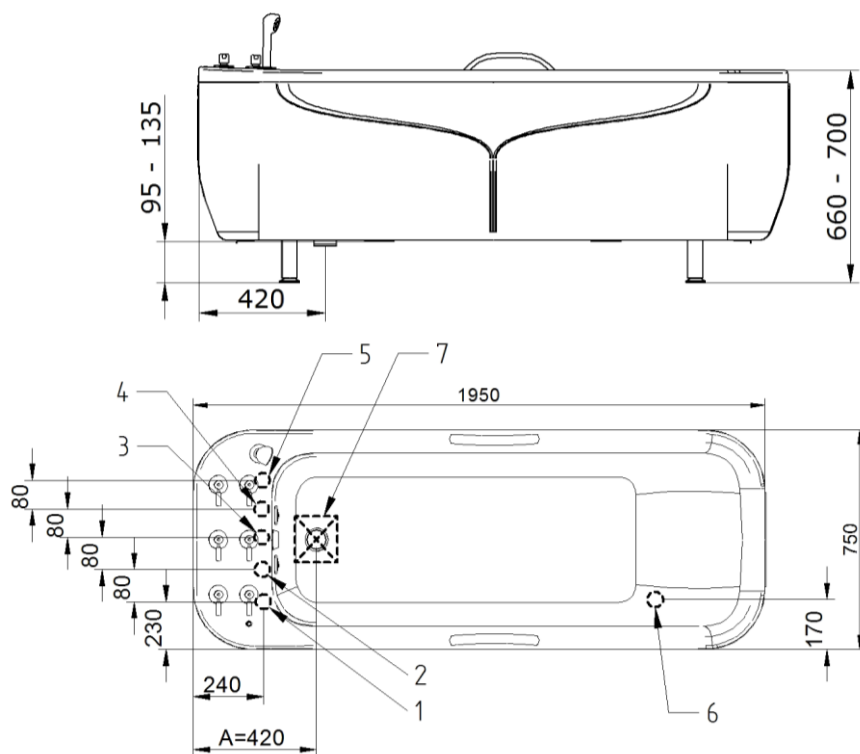

wymiar A=420 mm zapewnia położenie kratki bezpośrednio pod otworem spustowym niecki

Schemat instalacji wanny (wymiary w mm)

W miejscu posadowienia wanny należy wyprowadzić z posadzki na wysokość maksimum 150 mm:

- (1) - doprowadzenie ciepłej solanki, zakończone zewnętrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem odcinającym zainstalowanym w ścianie pomieszczenia;
- (2) - doprowadzenie zimnej solanki, zakończone zewnętrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem odcinającym zainstalowanym w ścianie pomieszczenia;
- (3) - doprowadzenie wody nasyconej CO₂, zakończone zewnętrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem odcinającym zainstalowanym w ścianie pomieszczenia;
- (4) - doprowadzenie zimnej wody, zakończone zewnętrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem odcinającym zainstalowanym w ścianie pomieszczenia;
- (5) - doprowadzenie ciepłej wody, zakończone zewnętrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem odcinającym zainstalowanym w ścianie pomieszczenia;
- (6) - doprowadzenie energii elektrycznej – patrz sekcja „Podłączenie do sieci elektrycznej 230V~50Hz” poniżej;
- (7) - kratka ściekowa z syfonem i z odpływem rurą o średnicy min. Ø 100 mm o przepustowości min. 3.5 l/s na całą długość odcinka odpływu do pionu.

Pomieszczenia, w których prowadzone są zabiegi balneologiczne powinny być wyposażone w dolne przelewy gazowe oraz w wentylację mechaniczną nawiewno-wyiewną z wyciągiem dolnym, zapewniającą zwiększoną wymianę powietrza przekraczającą dwukrotną wymianę na godzinę.

Podłączenie do sieci elektrycznej 230 V~50 Hz

Obwód zasilania musi być wydzielony tylko do zasilania tego urządzenia (nie może zasilać żadnych innych urządzeń) i musi zawierać:

- zabezpieczenie nadprądowe o wartości 6 A i charakterystyce typu C;
- wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie różnicowym ≤ 30 mA;
- wyłącznik zasilania rozłączający jednocześnie wszystkie bieguny, zapewniający odstęp między stykami przynajmniej 3 mm, umieszczony wewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się wyrób, w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki dostęp personelu w przypadkach awaryjnych. Jeżeli wyłącznik nie jest widoczny z pozycji normalnego użytkownika przez operatora lub personel serwisowy, należy zapewnić dodatkowe środki pozwalające na jego zablokowanie w pozycji wyłączonej;
- przekrój przewodu zasilającego $3 \times 1,5$ mm².

Obudowa zespołu zaciskowego sieciowego jest wyposażona w dławnicę zapewniającą szczelne zaciśnięcie na okrągłym przewodzie o średnicy 6-10 mm.

W przypadku zastosowania przewodu o innym rozmiarze, należy zastosować odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę zespołu zaciskowego sieciowego przed dostępem wody minimum IP X5.

Instalacja elektryczna, do której podłączane jest urządzenie musi spełniać wymagania odpowiadające obowiązującym przepisom prawa (np. EN 60364-7-710).

Wanna do kąpieli balneologicznych BALMED z masażem perełkowym (opcja AIR 64) i/lub efektami świetlnymi (opcja CHROMO) musi być przyłączona do instalacji elektrycznej na stałe.

Podłączenia układu elektrycznego wanny BALMED (opcja: AIR 64, CHROMO) do sieci zasilania 230V~50Hz powinien dokonać elektryk z uprawnieniami. Jednym z warunków gwarancyjnych jest potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia elektrycznego wanny przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne w tym zakresie.

Podłączenie do sieci wodnej i kanalizacyjnej

Zalecenia: średnica wewnętrzna instalacji doprowadzenia mediów min. DN 20 bez przewężeń, max. 6 bar, max. 60°C.

Ze względów sanitarnych niezalecane jest stałe połączenie instalacji odpływowej z instalacją budynku.

Po ustawieniu wanny w wyznaczonym miejscu należy wypoziomować ją przy pomocy regulowanych czterech nóg (każda regulacja wymaga zabezpieczenia, a po regulacji zabezpieczenia kontr-nakrętką).

W celu podłączenia wanny do sieci wodociągowej należy połączyć węże - zgodnie z oznaczeniami na nich – z wyprowadzonymi przyłączami w posadzce. Po sprawdzeniu poprawności podłączenia przewodów hydraulicznych i szczelności połączeń, montaż jest zakończony.

