



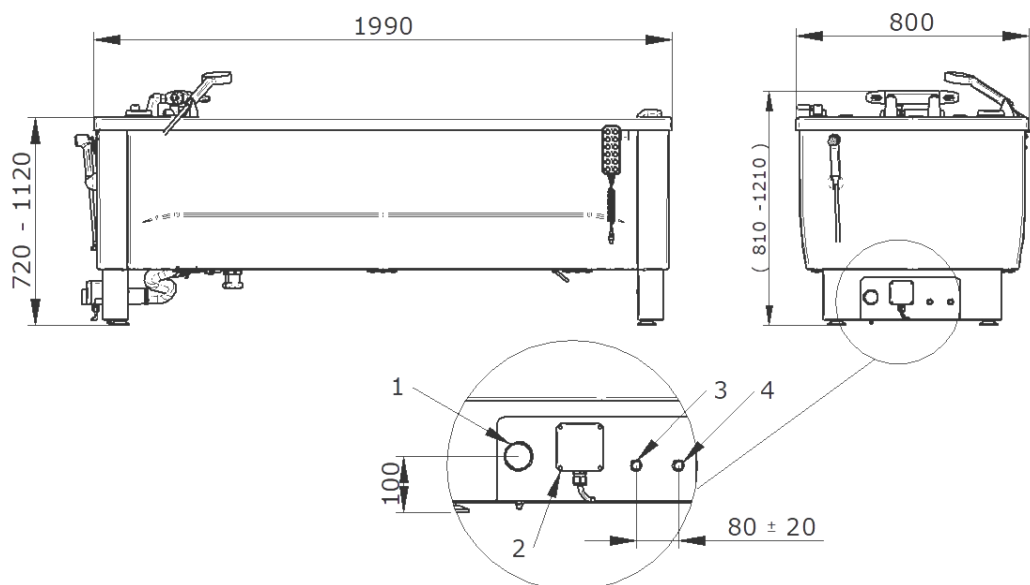


Gabaryty wanny Bathaid (wymiar w mm)

- 1 - wyprowadzony odpływ wody z wanny zakończony rurą fi 50 L=60 mm
- 2 - puszka przyłączeniowa zespołu zaciskowego sieciowego
- 3 - przyłącze zimnej wody w wannie zakończone GZ 1/2" L=30mm
- 4 - przyłącze ciepłej wody w wannie zakończone GZ 1/2" L=30mm

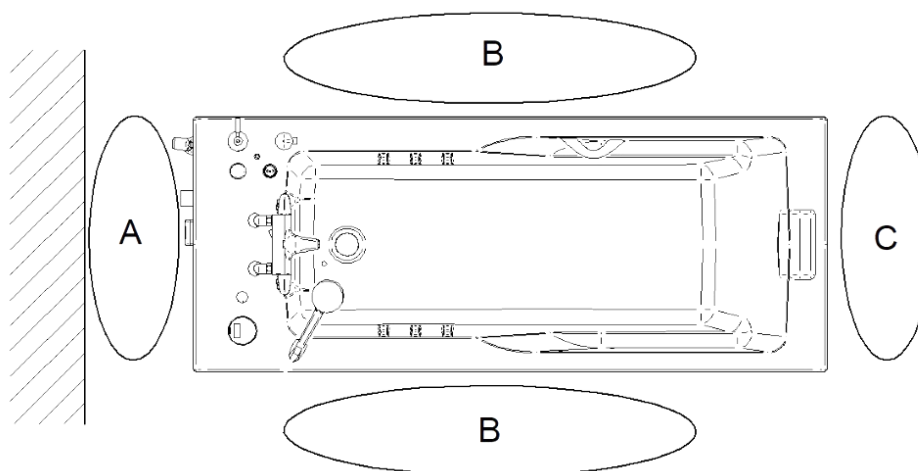

Lokalizacja wanny Bathaid

- A – minimum 400 mm od ściany, przestrzeń dla serwisu wanny i instalacji
- B – minimum 1500 mm, przestrzeń dla personelu i pacjenta oraz na dojazd podnośnikiem wannowym
- C – minimum 500 mm, przejście dla personelu

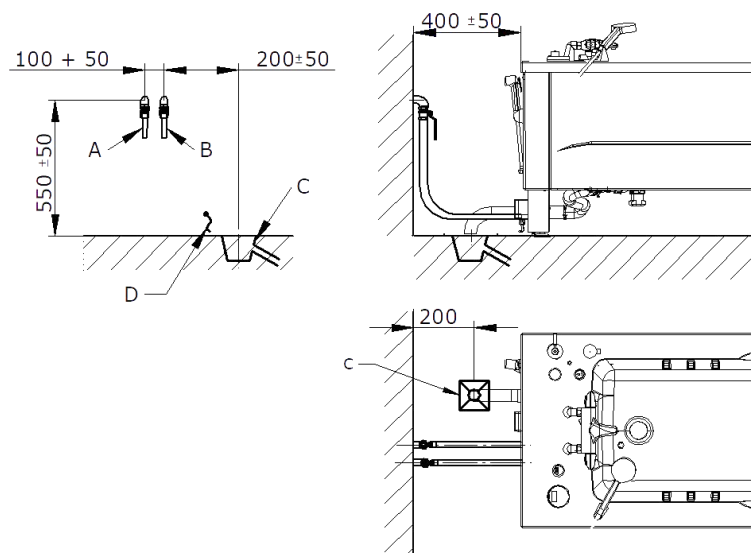

Schemat instalacji wanny Bathaid (wymiarów w mm)

W miejscu posadowienia wanny należy wyprowadzić:

- A** - doprowadzenie ciepłej wody (max 60°C) i ciśnieniu max 6 bar, przyłącze wyprowadzone ze ściany na wysokość 50cm ± 5cm, zakończona kolankiem 90° skierowane w dół z zewnętrznym gwintem 3/4", zabezpieczone zaworem odcinającym, zainstalowanym w ścianie pomieszczenia lub na wyprowadzonym przyłączu;
- B** - doprowadzenie zimnej wody o ciśnieniu max 6 bar, przyłącze wyprowadzone ze ściany na wysokość 50cm ± 5cm, zakończona kolankiem 90° skierowane w dół z zewnętrznym gwintem 3/4", zabezpieczona zaworem odcinającym, zainstalowanym w ścianie pomieszczenia lub na wyprowadzonym przyłączu;
- C** - kratka ściekowa z syfonem i z odpływem min. DN 100 o minimalnej przepustowości 3,5 l/s na całym odcinku odpływu do pionu, zrzut wody z wanny zakończony jest rurą DN 50;
- D** - doprowadzenie energii elektrycznej – patrz sekcja „Podłączenie do sieci elektrycznej 230 V~50 Hz” poniżej.

Ze względów sanitarnych niezalecane jest stałe połączenie instalacji odpływowej wanny z instalacją kanalizacyjną budynku. W pomieszczeniu powinna być zapewniona wentylacja.

Wanna w procesie produkcji została właściwie wypoziomowana. W przypadku nierównej posadzki w miejscu posadowienia wanny należy wykonać poziomowanie.

Podłączenie do sieci elektrycznej 230 V~50 Hz

Podłączenia układu elektrycznego urządzenia do sieci zasilania 230 V~50 Hz powinien dokonać elektryk z uprawnieniami. Jednym z warunków gwarancyjnych jest potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia elektrycznego przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne w tym zakresie.

Obwód zasilania musi być wydzielony tylko do zasilania tego urządzenia (nie może zasiląć żadnych innych urządzeń) i musi zawierać:

- przewód zasilający min. 3x1mm²;
(obudowa zespołu zaciskowego sieciowego jest wyposażona w dławnicę zapewniającą szczelne zaciśnięcie na obłym przewodzie o średnicy 5-10 mm. W przypadku zastosowania przewodu o innym rozmiarze, należy zastosować odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę zespołu zaciskowego sieciowego przed dostępem wody minimum IPX5).
- zabezpieczenie nadprądowe 6A o charakterystyce typ C;
- wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie różnicowym ≤ 30mA;
- wyłącznik zasilania, rozłączający jednocześnie wszystkie bieguny, zapewniający odstęp między stykami przynajmniej 3 mm, umieszczony w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki dostęp personelu w przypadkach awaryjnych. Jeżeli wyłącznik nie jest widoczny przez operatora lub personel serwisowy z pozycji normalnego użytkownika, należy zapewnić dodatkowe środki pozwalające na jego zablokowanie w pozycji wyłączonej.

Długość wyprowadzonego przewodu od ściany do podłączenia wanny powinna być min 1,5 m i umożliwiła odsunięcie wanny na odległość około 1 m od ściany.

Instalacja elektryczna, do której jest podłączana wanna Bathaid musi spełniać wymagania odpowiadające obowiązującym przepisom prawa (np. EN 60364-7-710). Urządzenie musi być przyłączone do instalacji elektrycznej na stałe.