

Wymogi instalacyjne
oraz przeglądy okresowe

LongLife



Wymogi instalacyjne (zapewnia klient):

- łącze internetowe - kabel Ethernet,
- wentylacja pomieszczenia - aktywna wymiana + klimatyzacja. W pomieszczeniu powinna panować temperatura 18-20-22 °C. Urządzenie sterujące wytwarza również ciepło i konieczne jest jego odprowadzenie, żeby temperatura otoczenia nie rosła.
- detektor CO₂ - TFA DOSTMANN RCO2NTROL,
- powierzchnia pomieszczenia - przynajmniej 15 m²,
- butla CO₂.

Przeglądy okresowe

Przegląd techniczny należy wykonywać co 24 miesiące. Jest obligatoryjny dla poprawnego i bezpiecznego działania komory.

Zakres prac:

- wymiana akumulatorów AGM,
- kalibracja czujników CO₂, H₂, O₂,
- wymiana filtrów w koncentratorze tlenu,
- sprawdzenie wydajności koncentratorów tlenu,
- wymiana roztworu generatora wodoru,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- przegląd instalacji elektrycznej/pneumatycznej,
- konserwacja/czyszczenie maszynowni,
- przegląd techniczny osuszacza powietrza,
- przegląd techniczny komory miękkiej.