



Montaż poręczy – opcja

Poręcze do urządzenia AQUAI należy zamontować zgodnie z poniższymi rysunkami. Kierunek montażu poręczy określamy patrząc z perspektywy użytkownika obsługującego panel wyrobu (rys.1).

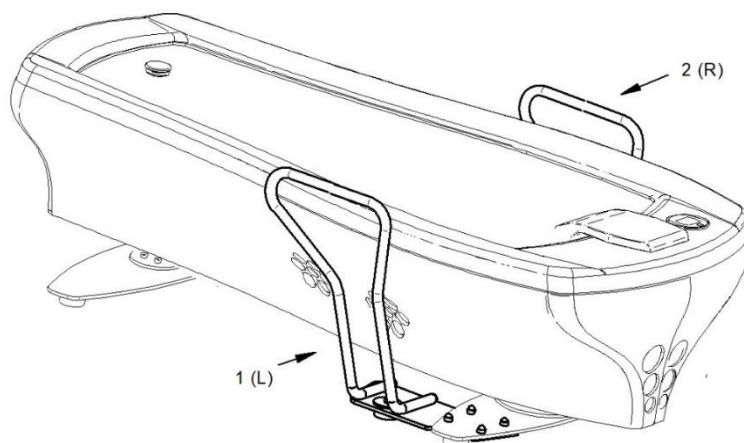


Rysunek 1 - Poręcze zamontowane do urządzenia AQUAI


W celu montażu należy przykręcić poręcz (rys.2, rys.3) do stopy urządzenia przy pomocy śrub M12x25 DIN 912 (rys.4 poz.B) i podkładek 13 DIN 7980 (rys.4 poz.C) używając klucza imbusowego nr 10 (klucz nie jest dołączony do wyrobu). Po montażu śrub i podkładek nałożyć osłony śrub (rys.4 poz.A). Powyższe czynności powtórzyć analogicznie dla drugiej poręczy.

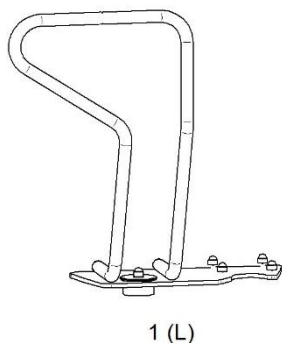

Rysunek 2 - Poręcz lewa

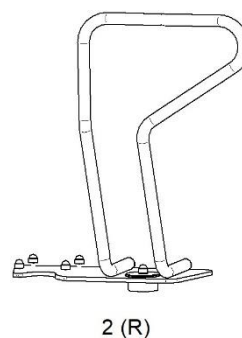

Rysunek 3 - Poręcz prawa

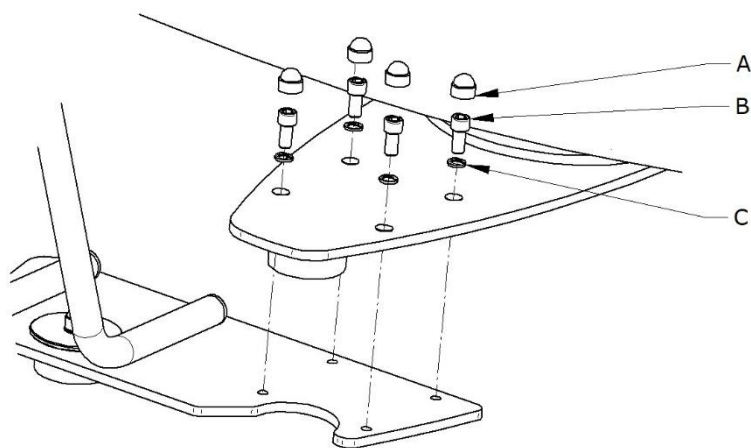

- A** – osłona śruby
- B** – śruba M12x25 DIN 912
- C** – podkładka 13 DIN 7980

Rysunek 4 – Montaż poręczy do stopy urządzenia AQUAI