





Urządzenie resi® OPEP

- Urządzenie do terapii oddechowej.
- Do odkrztuszania lepkiego śluzu oskrzelowego.
- Np. pacjenci z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, POChP, astmą oskrzelową, rozedmą płuc, rozstrzeniami oskrzeli lub mukowiscydozą.



- ✓ Oznaczenie CE.
- ✓ Zgodność z Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (MDR).
- ✓ Produkt wielokrotnego użytku.
- ✓ Szwajcarski producent.
- ✓ Wyprodukowano w Niemczech.

Ta ulotka zawiera informacje dotyczące wyrobu medycznego, który powinien być obsługiwany przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowany zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

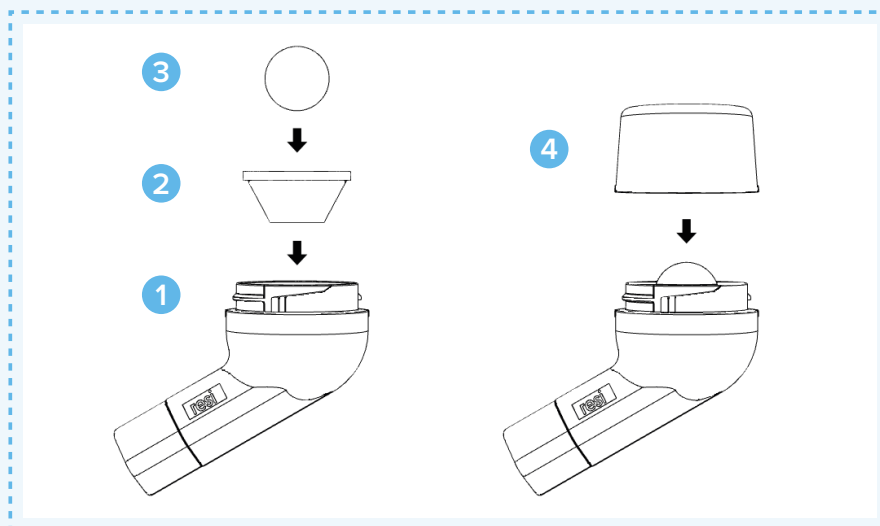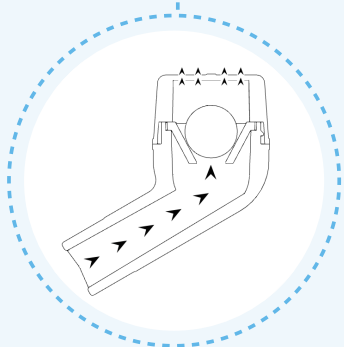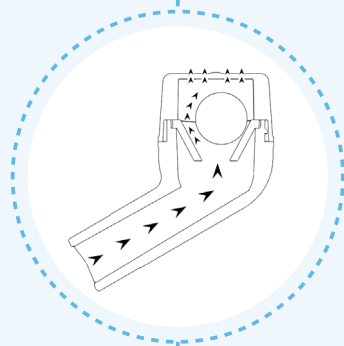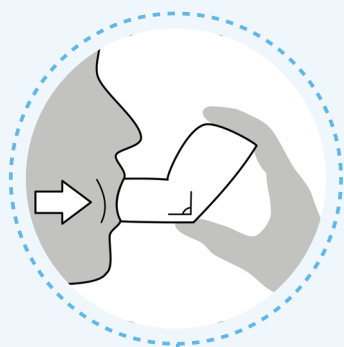

1 2 4 trzy części urządzenia resi® OPEP

3 metalowa kulka

Gdy pacjent wydycha powietrze, w urządzeniu i drogach oddechowych wytwarzane jest dodatkowe ciśnienie wydechowe (PEP). Ciśnienie PEP zapobiega zapadaniu się dróg oddechowych i wzrasta do momentu, gdy jest na tyle wysokie, aby przesunąć stalową kulkę w sposób umożliwiający jej w toczenie się po ściance lejka.

Podczas wydechu powstają vibracje, które zwiększają ciśnienie w oskrzelach aż do najgłębszych ich rozgałęzień i wprawiają wydychane powietrze w drgania, dzięki czemu śluz jest odrywany od ścian oskrzeli i można go lepiej przetransportować w kierunku ust. Ruch ten udrażnia drogę poprzez lejek i umożliwia wydostanie się powietrza pod ciśnieniem. Następnie kulka opada i ponownie zamyka otwór w lejku. Powoduje to ponowny wzrost ciśnienia w urządzeniu.