

ClearView®

MANIPULATOR MACICZNY



Manipulator maciczny ClearView z zakresem ruchu 210° i obrotowym uchwytem ułatwia kontrolę jedną ręką, umożliwiając chirurgowi niezależne manipulowanie macicą.



MANIPULATOR MACICZNY



Dobra widoczność

ClearView zapewnia 120° antywersji i 90° retrowersji, a także ruch boczny.



Sterowanie jedną ręką

Obrotowy uchwyt kontrolny.



Jednorazowego użytku

ClearView jest całkowicie jednorazowy.



Pozycjonowanie pacjenta

ClearView obraca się na wysokości szyjki macicy, dzięki czemu pozwala na utrzymanie pacjentki w pozycji leżącej na plecach.

KOMPLETNY JEDNORAZOWY ZESTAW

Sterylny zestaw ClearView zawiera wszystkie elementy niezbędne do procedury.

Chromotubacja

Port iniekcji barwnika pozwala na przeprowadzenie procedury chromotubacji

Kontrola macicy

Dołączona 12 ml strzykawka napełnia balonik na końcu dystalnym



Jednorazowy poszerzacz

Dołączona sonda pomaga zmierzyć i przygotować szyjkę macicy.

Dwa rozmiary

Podkładka skracająca końcówkę o 1 cm, co daje dwa rozmiary w jednym urządzeniu.

ClearView[®]Total

MANIPULATOR MACICZNY

ClearView Total charakteryzuje się tymi samymi cechami co ClearView. Dodatkowo wyposażony jest w balon okluzyjny oraz trzy nakładki do kolpotomii różnej wielkości. Balon okluzyjny zapobiega utracie odmy otrzewnowej po wykonaniu nacięcia kolpotomii podczas histerektomii laparoskopowej.



4cm



3.5cm




3cm

KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE CLEARVIEW



Sprawdź balon

Użyj dołączonej strzykawki, aby przetestować balon przed założeniem.

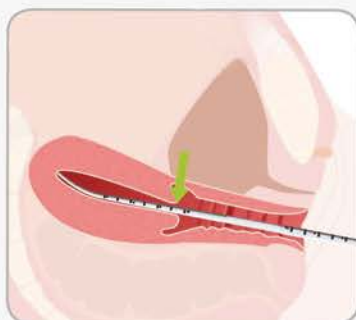


Zmierz wielkość macicy

Zmierz macicę. W razie potrzeby poszerz szyjkę macicy.



Wprowadź urządzenie i napompuj balon

Zwłóż końcówkę dystalną i włóż narzędzie do macicy. Powoli napompuj balon.

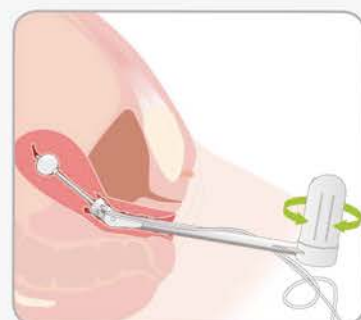

Uchwyt sterujący

Obracaj uchwyt, aby manipulować macicą.

Pełne instrukcje, ostrzeżenia, przeciwwskazania i środki ostrożności znajdują się w instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące zamawiania

Opis produktu	Kod produktu	Opakowanie
ClearView manipulator maciczny zestaw końcówka 7 cm	UM-700	5 szt.
ClearView manipulator maciczny zestaw końcówka 9 cm	UM-900	5 szt.
ClearView Total manipulator maciczny zestaw końcówka 7 cm	UM-750	5 szt.
ClearView Total manipulator maciczny zestaw końcówka 9 cm	UM-950	5 szt.
Jednorazowa sonda poszerzająca	DSD-1000	50 szt.

Wyłączny dystrybutor:

Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 609 139 337, mterczynska@meden.com.pl
tel.: +48 94 344 90 59 / 61, wam@meden.com.pl
fax.: +48 94 345 40 55, www.meden.com.pl


MEDEN INMED
PROFESJONALNA INŻYNIERIA MEDYCZNA