

- 26 • PRĘDKOŚĆ
- 27 • PRZERWA
- 28 • STOPER
- 29 • DOSTĘP DO PROGRAMÓW

Bezpieczeństwo

Po ustaleniu programu ćwiczeń należy potwierdzić poprawne wprowadzenie danych (czas trwania sesji, częstotliwość, itp.).

Pierwszy cykl należy przeprowadzić bez udziału pacjenta.

Pacjent winien wiedzieć jak uruchomić, zatrzymać urządzenie oraz anulować polecenia za pomocą przycisków START/STOP/REVERSE na pilocie.

Pacjent powinien mieć dostęp pilota w trakcie całego zabiegu (patrz str. 5).

Urządzenie KINETEC Breva jest zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/CEE.

RYZIKO EKSPLOZJI:

Urządzenie KINETEC Breva nie jest zaprojektowane do użycia w obecności łatwopalnych środków medycznych

W przypadku interferencji z polem elektromagnetycznym innych urządzeń należy przesunąć urządzenie na bezpieczną odległość.

KINETEC Breva spełnia obowiązujące standardy dotyczące pola elektromagnetycznego dla wyrobów medycznych (IEC 601.1.2).


Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać ruchomych części, istnieje ryzyko uszkodzenia ciała.

Podłączenie elektryczne

KINETEC Breva jest urządzeniem typu B klasy 1 ochrony przeciwporażeniowej. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy upewnić się, że wartość napięcia w sieci elektrycznej jest zgodna formacją zawartą na tabliczce znamionowej (100-240 V~ / 50-60 Hz).

Należy podłączyć pilot (13) i silnik (12).

Należy podłączyć kabel zasilający (30).

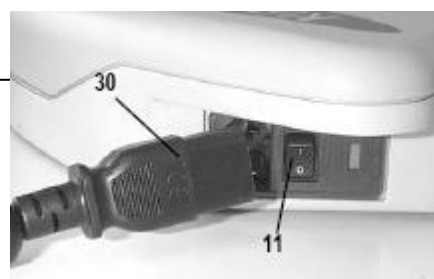

UWAGA!


Należy sprawdzić czy gniazdo elektryczne jest w dobrym stanie, czy jest kompatybilne z wtyczką oraz czy spełnia odpowiednie wymogi bezpieczeństwa i posiada bolec uziemiający.

Do podłączenia aparatu z gniazdem zasilającym należy użyć oryginalnego kabla dostarczonego wraz z urządzeniem. Kabel winien przebiegać swobodnie wokół urządzenia, co zapobiega jego ewentualnym uszkodzeniom.

Uruchomianie urządzenia

Urządzenie należy włączyć przełącznikiem (11)

Po włączeniu urządzenia zostaje przeprowadzona autodiagnostyka:

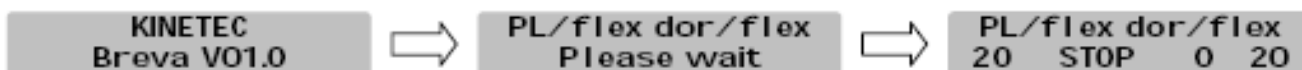

Po wykonaniu autodiagnostyki urządzenie jest gotowe do użycia.

Komentarz: Parametry ruchu pozostają zapisane, gdy urządzenie jest włączone / wyłączone (z wyjątkiem trybu czasu i rozgrzewki)

Obsługa pilota
Wybór języka

ROZPOCZĘCIE	PRZYCISK	WYŚWIETLACZ	KOMENTARZ
Włącz urządzenie		KINETEC BREVA V01.0	
		PL/FLEX DOR/FLEX Please wait	
		PL/FLEX DOR/FLEX 20 STOP 0 20	
Wciśnij jednocześnie 2 przyciski	 	Language: english	Na wyświetlaczu widzimy aktualnie używany język
By zmienić język	 or 	Language: french	Został wybrany język: Francuski Angielski Francuski Niemiecki Włoski Hiszpański
Zatwierdzenie wybranego języka		Ok Switch on/off	Włącz i wyłącz urządzenie by zatwierdzić wybrany język