


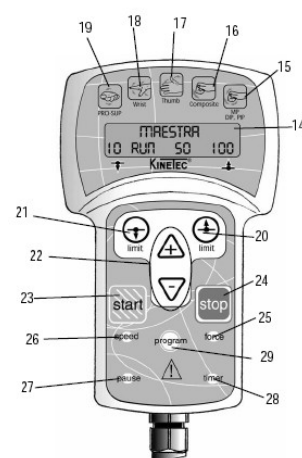

- 12. kabel zasilający
- 13. pilot
- 14. wyświetlacz ciekłokrystaliczny (2 linie po 16 znaków)
- 15. przycisk programów dla palców
- 16. przycisk programów dla całej dłoni
- 17. przycisk programów dla opozycji kciuka
- 18. przycisk programów dla nadgarstka
- 19. przycisk pronacji / supinacji
- 20. przycisk ustawiania maksymalnej granicy ruchu

- 21. przycisk ustawiania minimalnej granicy ruchu
- 22. przycisk ZWIĘKSZ / ZMNIEJSZ
- 23. przycisk START
- 24. przycisk STOP
- 25. przycisk SIŁA
- 26. przycisk PRĘDKOŚĆ
- 27. przycisk PAUZA
- 28. przycisk TIMER
- 29. przycisk wejścia w opcję PROGRAMY



Bezpieczeństwo

Tylko fizjoterapeuta może określić program ćwiczeń i nadzorować ich przebieg.

Pacjent musi być zaznajomiony z obsługą urządzenia, a zwłaszcza pilota sterującego urządzeniem, tak by w każdym momencie mógł użyć funkcji START / STOP / REVERSE. Pilot urządzenia musi być dla pacjenta dostępny w ciągu całego programu ćwiczeń.

Kinetec Maestra jest urządzeniem wyprodukowanym zgodnie z dyrektywą medyczną 93/42/CEE

UWAGA!!!

Zagrożenie wybuchem: urządzenia Kinetec nie są przeznaczone do używania w pobliżu łatwopalnych środków znieczulających.

W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń lub zakłóceń wywołanych przez inne urządzenia należy zmienić lokalizację aparatu.

Podłączenie elektryczne

Urządzenie Kinetec Maestra jest produktem typu B, klasa I.


Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu sprawdź, czy zasilanie odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej (100 – 240 V / 50 – 60 Hz).

Podłącz pilota (1).

Podłącz kabel zasilający (2).

WAŻNE!!!

Przed uruchomieniem Maestry prosimy sprawdzić, czy gniazdko elektryczne, do którego będzie ono podłączone, jest sprawne i czy odpowiada parametrom wskazanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Odnosi się to zwłaszcza do napięcia prądu i obecności bolca uziemiającego. Wtyczka urządzenia może być podłączona do każdego standardowego gniazdka. Do podłączenia prosimy używać jedynie oryginalnego kabla, dostarczonego wraz z urządzeniem. Prosimy o dopilnowanie, by kabel pozostał nieuszkodzony.

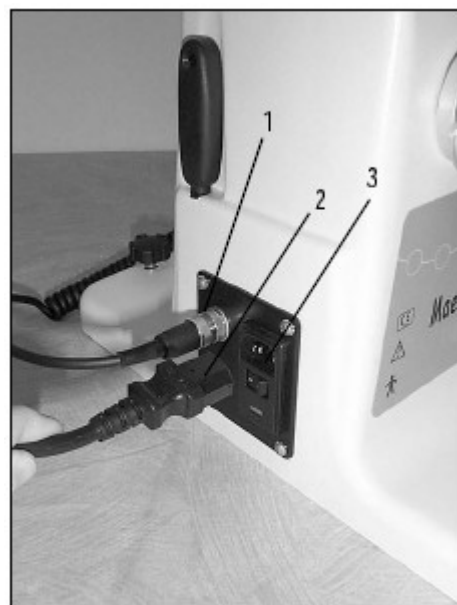

Uruchamianie urządzenia

Po włączeniu urządzenia za pomocą przełącznika z tyłu obudowy (3) zostaje przeprowadzony autotest diagnostyczny. Wyświetlacz pokazuje:

KINETEC
Maestra V01.0



Please wait



KINETEC
MAESTra V01.0

Po teście urządzenie jest gotowe do pracy.