

1. OPIS

Szyna KINETEC *Performa* jest urządzeniem do ciągłego ruchu biernego dla mobilizacji zgięcia i wyprostu stawu biodrowego i kolanowego.

A – podparcie dolnej kończyny • B - podparcie uda • C-podparcie stopy • D – pilot • E – kabel zasilający

2. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE - NAJPIERW BEZPIECZEŃSTWO

Kinetec *Performa* jest urządzeniem klasy I, typu B.

Podłącz kabel zasilający (1) do gniazdka urządzenia KINETEC *Performa* (napięcie pomiędzy 100 to 240 Vac 50/60 Hz).

WAŻNE:

Sprawdź, czy wtyczka idealnie pasuje do używanego gniazdka. Gniazdko musi być uziemione. Używaj tylko kabla dostarczonego z urządzeniem.

Upewnij się, że kabel zasilający nie jest splątany lub nie wplątał się w urządzenie przed jego uruchomieniem.

Wymiana bezpiecznika:

Uwaga: bezpiecznik należy wymienić na taki sam, co do typu i wartości

- w gniazdku głównych 2 bezpieczniki T 500 mA 250V (6.3x32)

- w zasilaczu PCB 1 bezpiecznik F 2 A 250V (5x20)

- PCB, 1 bezpiecznik T 2 A

3. BEZPIECZEŃSTWO

Tylko osoba z wykształceniem medycznym i przeszkolona w obsłudze sprzętu może zdecydować o użytkowaniu szyny i jego sposobie (uruchomienie, czas działania, częstotliwość sesji).

Pacjent musi być zaznajomiony z funkcjami Start/Stop/Reverse na pilocie.

Pilot jest wodoodporny według standardów UL 544 i powinien być naprawiany tylko przez producenta.

Urządzenie KINETEC *Performa* jest oznakowane znakiem CE (Dyrektywa 89/336/CEE)

NIEBEZPIECZEŃSTWO: istnieje ryzyko wybuchu przy używaniu łącznie z łatwopalnymi środkami anestetycznymi.