

urządzeniem.

- Kabel winien przebiegać swobodnie wokół urządzenia

Wymiana bezpieczników:

Bezpieczniki można wymienić tylko na bezpieczniki o tych samych parametrach:

- do głównego gniazda 2 bezpieczniki T 500 mA 250V (6.3X32)
- do zasilania PCB 1 bezpiecznik F 2 A 250V (5x20)
- do PCB 1 bezpiecznik T1.25 A (5x20)

3 • BEZPIECZEŃSTWO

Po zdefiniowaniu przez fizjoterapeutę protokołu należy potwierdzić poprawne wprowadzenie danych (czas trwania sesji, częstotliwość, itp.).

Pacjent musi znać funkcje pilota takie, jak START / STOP / REVERSE.

Pacjent musi mieć dostęp do pilota przez cały czas trwania zabiegu.

KINETEC Prima Advanced jest zgodna z normami dyrektywy 93/42/CEE.

RYZIKO EKSPLOZJI:

Urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy w obecności łatwopalnych środków medycznych.

W przypadku interferencji z polem elektromagnetycznym innych urządzeń należy przesunąć urządzenie na bezpieczną odległość.

KINETEC Prima Advanced spełnia obowiązujące standardy dotyczące pola elektromagnetycznego dla wyrobów medycznych (IEC 601.1.2) dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać ruchomych części, istnieje ryzyko uszkodzenia ciała.

4 • URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Należy włączyć urządzenie przełącznikiem (2).

Zapala się żółta lampka kontrolna (3) na panelu sterującym.

Funkcja START / STOP / REVERSE

KINETEC Prima Advanced jest urządzeniem, które posiada funkcje START/STOP/REVERSE.

By zatrzymać urządzenie należy wcisnąć przycisk na pilocie.

Ponowne naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje, uruchomienie urządzenia z przeciwnym kierunkiem ruchu.



UWAGA! Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy przed uruchomieniem urządzenia przekazać pilot pacjentowi.

Ustawianie limitów WYPROSTU i ZGIĘCIA

Limit kąta dla zgięcia reguluje się za pomocą pokrętki (4).

Limit kąta wyprostu reguluje się za pomocą pokrętki (5).

Limity kąta wyprostu i zgięcia można ustawiać, gdy urządzenie nie pracuje lub podczas sesji z pacjentem.

Ustawianie PRĘDKOŚCI

Prędkość reguluje się za pomocą pokrętki (6).

Przy prędkości maksymalnej, urządzenie porusza się z prędkością 145 ° na minutę (dla osoby o średniej długości uda).

Przy prędkości minimalnej, urządzenie porusza się z prędkością 40 ° na minutę (dla osoby o średniej długości uda).

Prędkość można ustawiać, gdy urządzenie jest nie pracuje lub podczas sesji

