

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Po wyborze programu leczenia należy potwierdzić poprawne wprowadzenie danych (czas trwania sesji, częstotliwości, itp.).

UWAGA: Przed rozpoczęciem zabiegu, należy uruchomić urządzenie bez pacjenta i sprawdzić poprawność jego działania

UWAGA: Dla zwiększenia bezpieczeństwa, przed uruchomieniem urządzenia należy przekazać pacjentowi pilot. Pacjent musi znać funkcje pilota takie, jak START / STOP / REVERSE (patrz. str. 3)

UWAGA: Mając na celu uniknięcia zmiany parametrów, zaleca się blokowanie pilota, przed przekazaniem go pacjentowi

UWAGA: Ryzyko eksplozji: Urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy w obecności łatwopalnych środków medycznych.

UWAGA: Urządzenie podłącza się tylko do gniazda spełniającego odpowiednie wymogi bezpieczeństwa i posiadającego bolec uziemiający

UWAGA: Należy sprawdzić czy gniazdo elektryczne jest w dobrym stanie, jest odpowiednie dla kabla zasilającego. Do podłączenia aparatu z gniazdem zasilającym należy użyć oryginalnego kabla dostarczonego wraz z urządzeniem. Kabel winien przebiegać swobodnie wokół urządzenia, co zapobiega jego ewentualnym uszkodzeniom

UWAGA: Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić czy nie jest ono uszkodzone, dotyczy to w szczególności obudowy ochronnej urządzenia

UWAGA: W przypadku interferencji z polem elektromagnetycznym innych urządzeń należy przesunąć urządzenie na bezpieczną odległość.

UWAGA: Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać ruchomych części, istnieje ryzyko uszkodzenia ciała.

UWAGA: Zabrania się jakiegokolwiek modyfikacji urządzenia

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

KINETEC Spectra Essentials jest zgodna z normami dyrektywy 93/42/EWG, oraz posiada znak CE.

KINETEC Spectra Essential spełnia obowiązujące standardy dotyczące pola elektromagnetycznego dla wyrobów medycznych (IEC 601.1.2) dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego.

KINETEC Spectra Essential jest zgodna z normami dyrektywy maszynowej 2006/42/EC.