



- OSTRZEŻENIE: Szyna musi zostać zamontowana i uruchomiona zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- OSTRZEŻENIE: Aby otrzymać wsparcie przy montażu, obsłudze lub konserwacji urządzenia, należy skontaktować się z dystrybutorem Kinetec®.
- OSTRZEŻENIE: Lekarz ustala protokół i zapewnia jego prawidłowe wdrożenie (ustawienia, czas trwania sesji i częstotliwość użytkowania).
- OSTRZEŻENIE: Przed umieszczeniem pacjenta na urządzeniu należy przeprowadzić cykl z nieobciążonym urządzeniem.
- OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, przed uruchomieniem systemu należy zawsze przekazać pacjentowi pilot zdalnego sterowania. Pacjent musi znać funkcję start/stop/zmiana kierunku na panelu sterowania ręcznego, patrz strona 7.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć zmiany parametrów, należy zablokować pilot sterowania ręcznego przed przekazaniem go pacjentowi, patrz strona 7.
- OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo, ryzyko wybuchu: Nie używać urządzenia z gazem anestetycznym lub w środowisku bogatym w tlen.
- OSTRZEŻENIE: Przed użyciem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy gniazdko elektryczne jest w dobrym stanie i czy jest odpowiednie dla przewodu zasilającego szynę. Używać tylko oryginalnego kabla dostarczonego z urządzeniem. Sprawdzić, czy przewody wokół urządzenia pozostają wolne, aby nie uległy uszkodzeniu.
- OSTRZEŻENIE: Przed użyciem szyny należy zawsze sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona, w szczególności jej obudowy ochronne.
- OSTRZEŻENIE: W przypadku zakłóceń elektromagnetycznych z innymi urządzeniami należy przesunąć urządzenie.
- OSTRZEŻENIE: Nie dotykać stałych lub ruchomych części podczas pracy urządzenia: ryzyko zaciśnięcia lub zmiażdżenia. Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: Modyfikowanie maszyny w jakikolwiek sposób jest surowo zabronione.
- OSTRZEŻENIE: Zawsze przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić parametry ruchu wyświetlane na pilocie zdalnego sterowania.
- OSTRZEŻENIE: Z szyną należy używać tylko akcesoriów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych opisanych w niniejszej instrukcji.
- OSTRZEŻENIE: Nie podłączać urządzenia do innych urządzeń, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji.
- OSTRZEŻENIE: Złącze USB pilota zdalnego sterowania musi być podłączone wyłącznie do pamięci USB.
- OSTRZEŻENIE: W przypadku wystąpienia cieczy na urządzeniu, gdy jest ono używane poza walizką transportową, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z dystrybutorem KINETEC®.
- OSTRZEŻENIE: W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń lub usterek należy skontaktować się z dystrybutorem Kinetec®.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenia komunikacji bezprzewodowej, takie jak domowe urządzenia bezprzewodowe w sieciach, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i ich stacje bazowe oraz krótkofalówki, mogą mieć wpływ na urządzenie. Zaleca się zachowanie co najmniej odległości d pomiędzy tymi urządzeniami a maszyną. Patrz tabela na stronie 18.
- OSTRZEŻENIE: Według informacji wymienionych w tej instrukcji obsługi maksymalna temperatura, jaką może osiągnąć pilot zdalnego sterowania, wynosi 48,8 C.

3. Zgodność

Urządzenie Kinetec Spectra XL™ jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG i jest opatrzone znakiem CE.

Urządzenie Kinetec Spectra XL™ spełnia wymagania obowiązujących norm IEC 60601-1-2 dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń medycznych, IEC 60601-1 dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego i IEC 60601-1-11 dotyczącej wykorzystania w środowisku opieki domowej.

Urządzenie Kinetec Spectra XL™ spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej nr 2006/42/WE.

4. Rozpakowanie i pakowanie


4.1. Rozpakowanie

Rozpakowując urządzenie, należy pamiętać, że może być konieczne jej ponowne zapakowanie, dlatego zalecamy przechowywanie materiałów opakowaniowych, pudełek i toreb plastikowych.

Zalecenia dotyczące torebek foliowych: nie zakładać ich na głowę, ze względu na ryzyko uduszenia, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uważać na małe części: mogą zostać połknięte przez dziecko. Należy uważać na kable i przewody: ryzyko uduszenia.

Przed użyciem maszyny należy ustawić podnóżek w pozycji roboczej. (Patrz strona 14).


Urządzenie jest gotowe do podłączenia do zasilania. (Patrz strona 6).

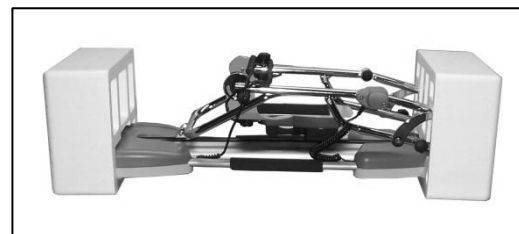

4.2. Pakowanie

Aby zapobiec problemom podczas transportu urządzenia, należy je pakować wyłącznie przy użyciu oryginalnego opakowania.

- Ustawić podnóżek na 42 cm
- Zatrzymać urządzenie przy 5° zgięcia.
- Przesunąć podnóżek z powrotem do pozycji podczas pakowania.

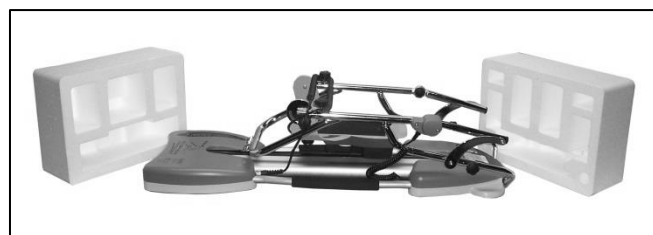

5. Instalacja urządzenia

Urządzenie Kinetec Spectra XL™ jest przeznaczone do stosowania w szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich lub w domach prywatnych (wynajem).

Szyna musi być zamontowana na płaskiej powierzchni, która jest wystarczająco szeroka, aby pomieścić całe urządzenie oraz drugą nogę.

Zalecamy używanie urządzenia wraz ze stołem fizjoterapeutycznym, łóżkiem medycznym, łóżkiem lub ławką. Nie zaleca się stosowania nadmuchiwanego materaca.