

3.3. Kompletacja

Stół do masażu TERAPEUTA	wg zamówienia
Instrukcja obsługi	1 szt.
Zatyczka szczeliny twarzowo-nosowej	1 szt.
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe	wg zamówienia

3.4. Transport i przechowywanie

Warunki otoczenia dla składowania i transportu przedstawione zostały w tabeli 1. Transport stołu Terapeuta do klienta odbywa się w kartonowym opakowaniu na palecie. Dopuszcza się sztaplowanie stołów do transportu, w co najwyżej 3 warstwach na specjalnie przygotowanych do tego celu paletach. Krawędzie zewnętrzne części tapicerowanych są dodatkowo zabezpieczane za pomocą profili z pianki oraz folii „bąbelkowej” i folii typu „stretch”.

W trakcie eksploatacji przemieszczanie stołu Terapeuta w pomieszczeniach należy wykonywać w taki sposób, aby nie narażać jego krawędzi zewnętrznych na uderzenia i otarcia.

4. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym urządzenie musi być przyłączone wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym. Nie należy używać jakichkolwiek przedłużaczy i rozgałęźników.



UWAGA!

Nie należy używać stołu z przewodem zasilania innym niż dostarczony przez producenta.



UWAGA!

Stoły z rodziny TERAPEUTA posiadają ograniczoną zdolność obciążeniową. Masa pacjenta przy unoszeniu-opuszczaniu leża nie powinna przekraczać 225 kg, a maksymalne bezpieczne obciążenie robocze leża stołu podczas wykonywania masażu nie powinno przekraczać 300 kg.




UWAGA!

W przypadku umieszczenia pacjenta w nieprawidłowej pozycji względem elementów ruchomych leża, istnieje zagrożenie uszkodzenia ciała lub konstrukcji stołu.




UWAGA!


Nie wolno opuszczać stołu z opuszczonym do dołu zagłówkiem (sekcją przednią).
Nie wolno opuszczać stołu z opuszczonymi elementami tapicerki sekcji przedniej.

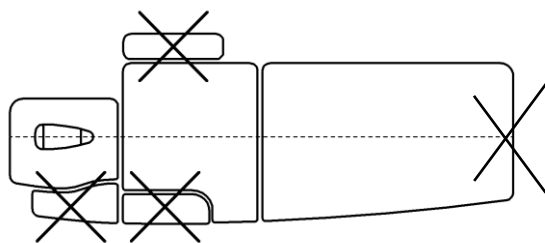

Nie wolno siadać na ruchomych elementach tapicerki sekcji przedniej i środkowej.

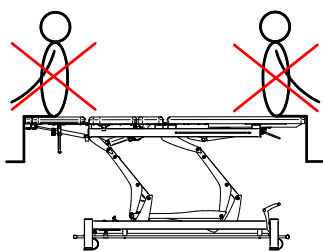

ŹLE

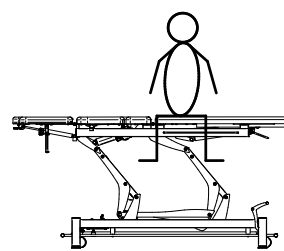

DOBRCZE

Nie wolno obciążać stołu w sekcji przedniej lub tylnej w taki sposób, jak na ilustracji po lewej stronie.

Rysunek 13 – Sposoby prawidłowego i nieprawidłowego obciążania stołu

UWAGA!



Nie należy dopuszczać do kontaktu (zalania) z płynami (kawa, herbata, woda, środki myjące i dezynfekujące) instalacji elektrycznej siłownika i innych elementów automatyki stołu. W przypadku zalania instalacji elektrycznej lub osłon siłownika należy bezzwłocznie odłączyć zasilanie stołu przez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda zasilania sieciowego, po czym wykonać przegląd stołu pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego jego użytkowania.

Przed rozpoczęciem zabiegu masażu, pacjentowi należy ułatwić zajęcie pozycji ułożeniowej przez opuszczenie leża stołu do maksymalnego dolnego położenia. Podobnie, po zakończonym zabiegu, pacjentowi należy ułatwić schodzenie ze stołu przez opuszczenie leża do maksymalnego dolnego położenia.

5. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

UWAGA!



Przy ustalaniu lub zmianie miejsca użytkowania stołu TERAPEUTA należy zwrócić szczególną uwagę, aby w przestrzeni pod stołem nie znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Należy uniemożliwić niekontrolowany dostęp do miejsca użytkowania stołu dzieciom, a także zwierzętom domowym (kot, pies itp.).

UWAGA!



W celu niezawodnego odłączenia układu zasilania stołu, należy wyjąć wtyczkę sieciową przewodu zasilania stołu z gniazda zasilania sieciowego.

UWAGA!



Wszelkich manipulacji w przestrzeni pod leżem stołu należy wykonywać po upewnieniu się, że wtyczka sieciowa przewodu zasilania stołu jest wyjęta z gniazda zasilania sieciowego.

UWAGA!




Podłączenie przewodu zasilania należy wykonać tak, aby nie dopuścić do przypadkowego jego zaciśnięcia pomiędzy ruchomymi częściami stołu. Przewód zasilania należy prowadzić od stołu TERAPEUTA do gniazda zasilania sieciowego tak, aby wyeliminować możliwość zahaczenia lub potknięcia się pacjenta lub masażysty.

UWAGA!



Stołu TERAPEUTA nie należy eksploatować w pomieszczeniach o dużej wilgotności względnej powietrza, w szczególności w pomieszczeniach przeznaczonych do zabiegów hydroterapii.

Miejsce eksploatacji stołu należy wybrać tak, by po ustawieniu stołu z każdej jego strony powinna pozostać przestrzeń o szerokości minimum 80 cm.

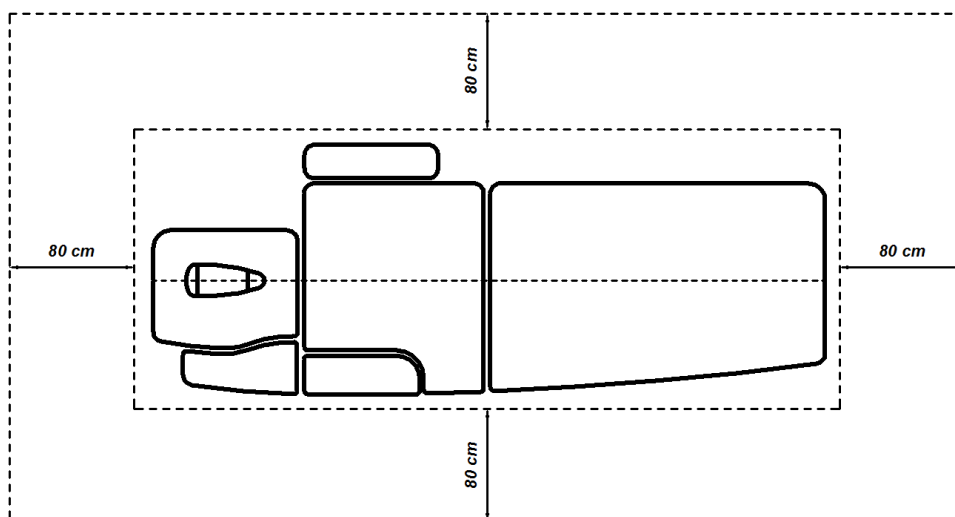


Rysunek 14 - Zalecana lokalizacja stołu do masażu TERAPEUTA

Po wstępnym ustawieniu stołu należy rozpakować go z folii transportowej, a wtyczkę sieciową przewodu zasilania włączyć do gniazda zasilania sieciowego, do którego w trakcie użytkowania stołu zapewniony jest swobodny dostęp.


W przypadku gdy przewód zasilania jest odłączony od sterownika, należy podłączyć go w następujący sposób:

Wsunąć przewód zasilania do gniazda zasilania sterownika ① do momentu zadziałania blokady ②.

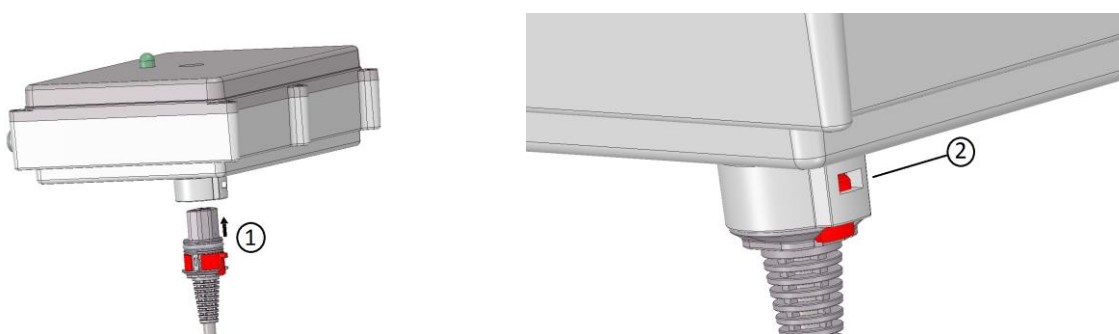

Rysunek 15 – Podłączanie przewodu zasilania

Przed odłączeniem przewodu zasilania od sterownika, należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest wyjęta z gniazda zasilania sieciowego, następnie należy wcisnąć element blokady ② za pomocą wkrętaka ③ i wyciągnąć przewód zasilania z gniazda zasilania sterownika ①.

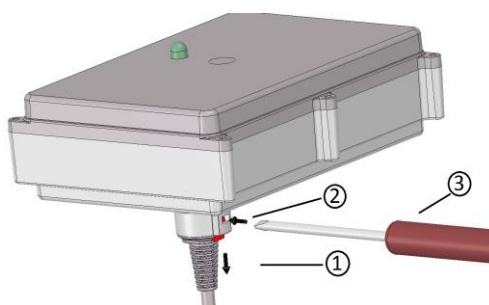

Rysunek 16 – Odłączanie przewodu zasilania

6. CZYNNOŚCI PRZY OBSŁUDZE



UWAGA!
Należy zawsze zachowywać bezpieczny odstęp od mechanizmów stołu, działających w czasie regulacji wysokości i położenia sekcji leżyska. Ruchome elementy mechanizmów stwarzają zagrożenie zagniecenia.



UWAGA!
Podczas używania w pobliżu stołu innych urządzeń elektrycznych, należy zwrócić uwagę aby ich przewody zasilania nie zostały zaciśnięte lub uszkodzone przez ruchome części stołu.



UWAGA!
Przed przystąpieniem do pracy na stole należy upewnić się, czy stół spoczywa na stopkach – pozycja PRACA (patrz p.6.8).



UWAGA!
Przed przystąpieniem do pracy użytkownik powinien upewnić się, czy pacjent znajduje się w bezpiecznej pozycji.



UWAGA!
Należy unikać kontaktu powierzchni tapicerowanych z: olejkami, płynami do masażu, kosmetykami do pielęgnacji twarzy i makijażu. Kontakt z takimi środkami może powodować uszczywnienie i pękanie materiału pokrycia, a także zmianę połysku powierzchni tapicerki, niepodlegające warunkom gwarancji.

Przed przystąpieniem do pracy na stole TERAPEUTA dla każdego pacjenta należy przygotować jednorazowe pokrycie leża (prześcieradło lub ręcznik papierowy, podkład chirurgiczny), zwłaszcza wtedy, gdy stosuje się środki poślizgowe lub wspomagające (oliwki, żele, talk, maści lecznicze, kremy). Pacjent powinien być ubrany w luźną bieliznę, niepowodującą nadmiernego ucisku, a podczas zabiegu, bez względu na charakter masażu, powinien być przykryty - odkrywa się jedynie aktualnie masowane partie ciała. Brak powodów do skrępowania ułatwia rozluźnienie, a okrywanie wymasowanych partii ciała sprzyja poprawie ukrwienia i przedłuża odczucie ciepła.

6.1. Poziomowanie stołu na stanowisku pracy

Po ustawieniu stołu w miejscu pracy należy przy pomocy stopek (4 stopki w ramie dolnej F4, 2 stopki w ramie dolnej F0) wypoziomować stół. Jest to niezbędna czynność, która ma na celu ustalenie właściwych warunków pracy konstrukcji (patrz p.6.8).

6.2. Regulacja wysokości stołu - podnoszenie (opuszczanie) leża



UWAGA!
Przed przystąpieniem do regulacji stołu użytkownik powinien upewnić się, czy pacjent znajduje się w bezpiecznej pozycji.



UWAGA!
W przypadku regulacji stołu nieosłoniętą stopą istnieje ryzyko urazu.

Sterowanie wysokością leża stołu umożliwia zainstalowany w dolnej ramie przełącznik nożny w postaci ruchomo zawieszanej ramki. W celu podniesienia leża stołu na żądaną wysokość, ramkę sterującą należy przesunąć nogą w kierunku **(B)** zagłówka. Analogicznie - opuszczanie leża stołu odbywa się przez wychylenie ramki sterującej w kierunku **(A)** części tylnej leża (p.rys.4). Podnoszenie (opuszczanie) leża stołu trwa tak długo, jak długo przytrzymywana jest w lewej (lub w prawej) pozycji ramka sterująca. Po osiągnięciu skrajnej, maksymalnej lub minimalnej, wysokości siłownik wyłącza się automatycznie.

6.3. Regulacja kąta uniesienia/opadania sekcji przedniej (tylnej)



UWAGA!


Nie należy wsuwać palców dłoni w szczeliny pomiędzy poszczególnymi segmentami leża, ponieważ grozi to ich przytrzaśnięciem w trakcie podnoszenia lub regulacji i położenia części leża.



UWAGA!

Przed przystąpieniem do regulacji stołu użytkownik powinien upewnić się, czy pacjent znajduje się w bezpiecznej pozycji.

W celu przestawienia pochylenia sekcji przedniej (tylnej) stołu TERAPEUTA należy zwolnić blokadę sprężyny gazowej przez przytrzymanie jej uchwyty (p.rys.4 - pozycja C), ustawić żądane położenie sekcji przedniej i ponownie zablokować sprężynę przez puszczenie jej uchwyty.

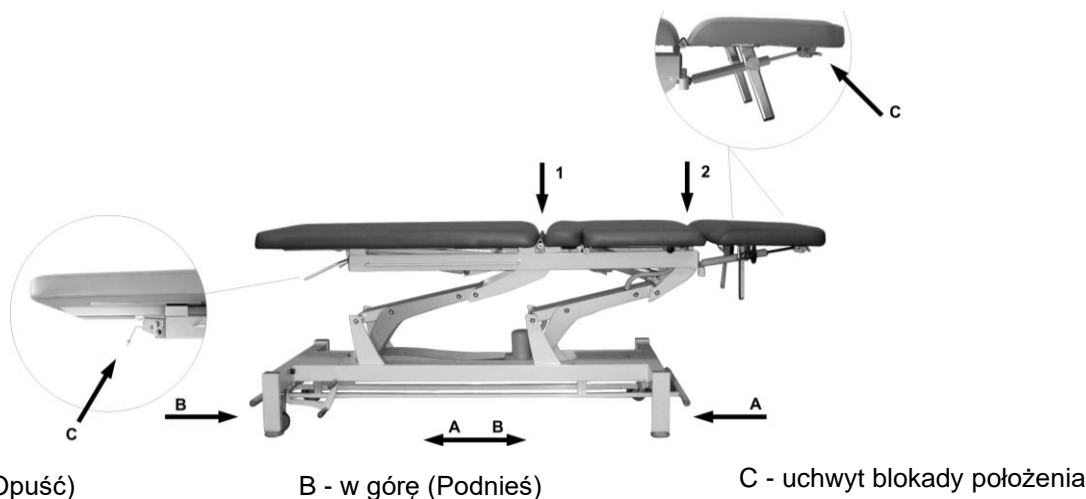

A - w dół (Opuść)

B - w górę (Podnieś)

C - uchwyt blokady położenia

1 - otwór pod bananek stabilizujący w sekcji środkowej

2 - dwa otwory pod bananki stabilizujące w sekcji przedniej

Rysunek 17 - Elementy regulacji stołu do masażu TERAPEUTA

6.4. Regulacja kąta łamania sekcji środkowej stołu



UWAGA!


Przed przystąpieniem do regulacji stołu użytkownik powinien upewnić się, czy pacjent znajduje się w bezpiecznej pozycji.



UWAGA!

Przed użyciem funkcji łamania sekcji środkowej stołu, bananki stabilizujące należy bezwzględnie usunąć z otworów mocujących w sekcji przedniej i środkowej leża stołu.

W stołach Terapeuta typ M-P3.Fx, M-P5.Fx, M-P7.Fx lub O-P5.Fx istnieje możliwość łamania sekcji środkowej leża za pomocą siłownika elektrycznego. Funkcja aktywowana jest przy użyciu paneli sterujących DPA, umieszczonych od spodu leża w sekcji środkowej. W celu uniesienia sekcji środkowej leża, należy przytrzymać lewy przycisk na panelu DPA. Opuszczenie części środkowej leża i powrót do pozycji wyjściowej, odbywa się przez przytrzymanie prawego przycisku na panelu DPA.

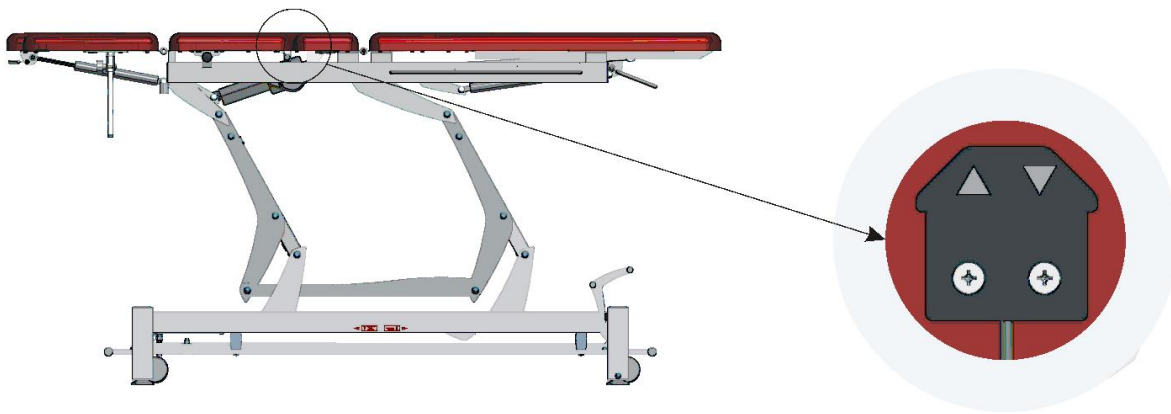

Rysunek 18 – Regulacja kąta łamania sekcji środkowej stołu

6.5. Regulacja wysokości boczaków w części zagłówka

W stołach Terapeuta typ M-S5.Fx, M-S7.Fx, M-P5.Fx lub M-P7.Fx istnieje możliwość regulowania wysokości boczaków w części zagłówka. W celu zmiany położenia blatu bocznaka, należy zwolnić przez odkręcenie pokrętki blokady, ustawić żądaną wysokość oraz ponownie dokręcić pokrętkę blokady.

6.6. Opuszczanie boczaków w części środkowej stołu



UWAGA!

W stołach Terapeuta M-S7.Fx, M-P7.Fx opuszczanie bocznaka następuje wzdłuż krótszej krawędzi leża.



UWAGA!

W stołach Terapeuta O-S5.Fx, O-P5.Fx opuszczanie bocznaka następuje wzdłuż dłuższej krawędzi leża.


W stołach Terapeuta M-S7.Fx, M-P7.Fx, O-S5.Fx, O-P5.Fx istnieje możliwość opuszczenia boczaków w części środkowej stołu. W modelach stołów M-S7.Fx, M-P7.Fx zwolnienie blokady i opuszczenia bocznaka następuje przez odciągnięcie trzpienia blokującego umieszczonego prostopadłe do osi stołu. Blokowanie położenia bocznaka następuje samoczynnie przez specjalnie ukształtowany system zatrzasku - trzpień blokady musi zostać osadzony w otworze zatrzasku. W modelach stołów O-S5.Fx, O-P5.Fx zwolnienie blokady i opuszczenia bocznaka następuje przez odciągnięcie trzpienia blokującego umieszczonego równoległe do osi stołu. Trzpień blokady stanowi zintegrowaną całość z zawiasem bocznaka, dlatego do odblokowania i opuszczenia blatu bocznaka należy przesunąć cały boczek w stronę przeciwną do zagłówka. Blokowanie położenia bocznaka następuje samoczynnie przez specjalnie ukształtowany system zatrzasku - trzpień blokady musi zostać osadzony w otworze zatrzasku.

6.7. Blokada dostępu



UWAGA!

Zawsze przed opuszczeniem stanowiska pracy, należy wyjąć klucz z gniazda blokady, uniemożliwiając uruchomienie funkcji sterowania stołem przez osoby nieupoważnione. Następnie sprawdzić działanie blokady wykonując próbę ruchu w górę i w dół leża stołu.

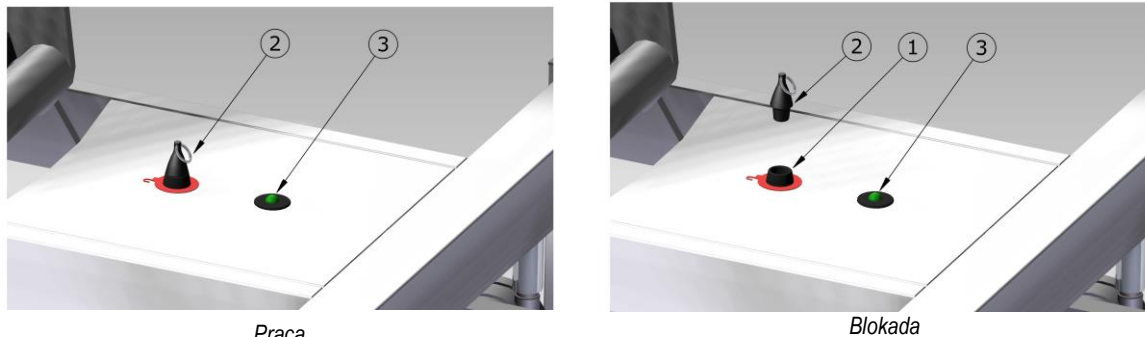

Rysunek 19 - Działanie mechanizmu blokady dostępu

Stoły TERAPEUTA są wyposażone w mechanizm blokady dostępu do funkcji regulacji wysokości leża (p.rys.5). Funkcja regulacji jest zablokowana, gdy klucz ① jest wyjęty z gniazda ②, a dioda ③ mruga w interwale 0,7 s. Regulacja wysokości jest możliwa, gdy klucz ① znajduje się w gnieździe ②, co sygnalizuje dioda ③ światłem ciągłym.

6.8. Zmiana lokalizacji stołu



UWAGA!
Przed zmianą lokalizacji stołu należy upewnić się, że wtyczka sieciowa przewodu zasilania jest wyjęta z gniazda zasilania sieciowego oraz zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie zmiany lokalizacji.



UWAGA!
Zabronione jest przemieszczanie stołu TERAPEUTA na kołach jezdnych wraz z pacjentem.




UWAGA!
Wszelkich manipulacji dźwignią zmiany pozycji PRACA-TRANSPORT należy dokonywać ze stołem bez pacjenta.

A – PRACA

B – TRANSPORT

C - DŹWIGNIA ZMIANY POZYCJI

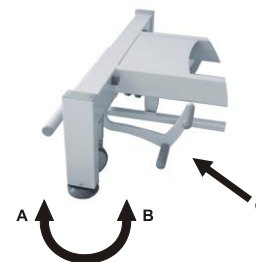

Rysunek 20 - Zmiana lokalizacji stołu do masażu TERAPEUTA

Stół TERAPEUTA z ramą dolną F4 wyposażony jest w dźwignię nożną (pozycja C na rys.7), która umożliwia ustawienie stołu w jednej z dwóch pozycji:

- PRACA (A) - stół spoczywa na stopkach, które posiadają regulację poziomu przez wkręcenie/wykręcenie wkładki stopki (p.p.6.1);
- TRANSPORT (B) - stół spoczywa na kołach jezdnych, umożliwiających łatwe przemieszczanie.

Rama dolna stołu TERAPEUTA w wersji F0 wyposażona jest w dwie stopki od strony zagłówka oraz w dwa kółka w części tylnej. Po uniesieniu przedniej części za zagłówek - **nie należy przy tym chwytać za zwalnicznik sprężyny zagłówka** - można przemieszczać stół na kółkach części tylnej.