

4. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!



Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym urządzenie musi być przyłączone wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym. Nie należy używać żadnych przedłużaczy i rozgałęźników.

UWAGA!



Nie należy używać stołu z przewodem zasilania innym niż dostarczony przez producenta.

UWAGA!



Stoły z rodziny TERAPEUTA posiadają ograniczoną zdolność obciążeniową. Masa pacjenta przy unoszeniu-opuszczaniu leża nie powinna przekraczać 225 kg, a maksymalne bezpieczne obciążenie robocze leża stołu podczas wykonywania masażu nie powinno przekraczać 300 kg.

UWAGA!




W przypadku umieszczenia pacjenta w nieprawidłowej pozycji względem elementów ruchomych leża, istnieje zagrożenie uszkodzenia ciała lub konstrukcji stołu.

UWAGA!




Nie wolno opuszczać stołu z opuszczonym do dołu zagłówkiem (sekcją przednią).



Nie wolno opuszczać stołu z opuszczonymi elementami tapicerki sekcji przedniej.

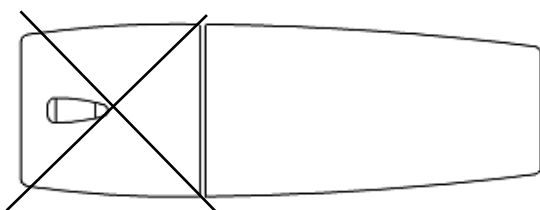

Nie wolno siadać na ruchomych elementach tapicerki sekcji przedniej.

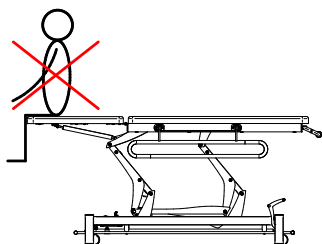

ŹLE

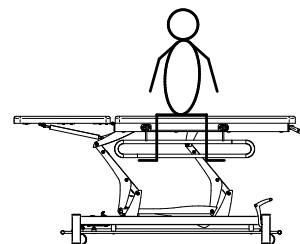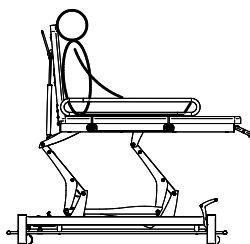

DOBRE

Nie wolno obciążać stołu w sekcji przedniej lub tylnej w taki sposób, jak na ilustracji po lewej stronie.

Rysunek 4 – Sposoby prawidłowego i nieprawidłowego obciążania stołu