

5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

5.1 Miejsce eksploatacji



UWAGA!

W obrębie miejsca eksploatacji urządzenia AQUAI powinna znajdować się kratka ściekowa, w razie potrzeby zrzutu wody lub podczas awarii urządzenia (np. rozszczelnienia).



UWAGA!

W pomieszczeniu musi być zapewniona wentylacja o wydajności, zapewniającej co najmniej dwukrotną wymianę powietrza na godzinę. Korzystanie z urządzenia w pomieszczeniach niespełniających tych wymagań skutkuje niestabilną pracą systemu chłodzenia, co może być przyczyną wzrostu temperatury wody w urządzeniu. W takich sytuacjach zaleca się przynajmniej dziesięciominutowe przerwy pomiędzy zabiegami.

5.2 Uwagi do stosowania



UWAGA!

Na powierzchnię membrany nie wolno kłaść się w ubiorze z elementami, które mogą uszkodzić powierzchnię membrany, takimi jak: napy, zatrzaski, zszywki, uchwyty zamków błyskawicznych. Warunki gwarancji producenta nie obejmują tego rodzaju uszkodzeń membrany. Membranę uszkodzić mogą również kolczyki, ostre krawędzie pierścionków i obrączek, długie paznokcie itp. Zaleca się stosowanie podczas zabiegu lekkiej odzieży sportowej (np. spodnie od dresów i podkoszulka).

6. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA



UWAGA!

Manipulując za pomocą podnośnika podczas instalacji urządzenia w miejscu użytkowania należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa przy przemieszczaniu w pionie dużych mas. Niekontrolowane zsuniecie się niecki z podnośnika może stworzyć duże zagrożenie dla osoby dokonującej instalacji i/lub serwisu urządzenia.



UWAGA!


Po zakończonym montażu, urządzenia nie należy przemieszczać, gdyż może nastąpić uszkodzenie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie.



UWAGA!

Przy pierwszym uruchomieniu niezbędne jest jednorazowe napełnienie wnętrza niecki urządzenia zimną wodą (maksymalne ciśnienie w instalacji zasilającej 6 barów).

Montaż i pierwsze uruchomienie urządzenia przeprowadza serwis wykonawcy lub upoważnionej przez wykonawcę jednostki.

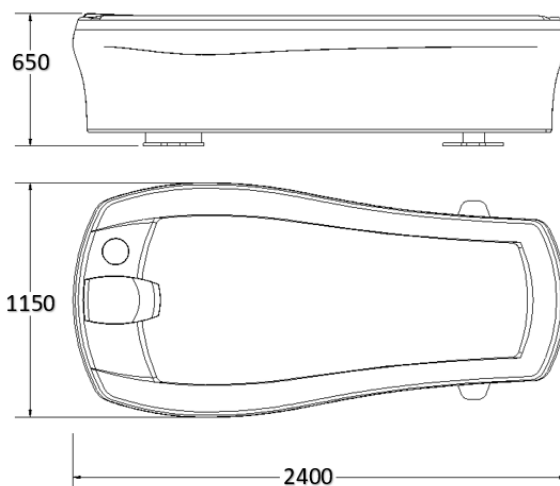

Rysunek 2 – Wymiary urządzenia [mm]