

6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

6.1 Miejsce eksploatacji



UWAGA !
Ze względów sanitarnych niezalecane jest stałe połączenie instalacji odpływowej wanny z instalacją kanalizacyjną budynku, ponieważ w przypadku niewydolności lub awarii instalacji kanalizacyjnej istnieje zagrożenie bakteriologiczne ściekami z innych urządzeń.



UWAGA !
Zalecane jest, aby w pomieszczeniu umieścić dodatkowe łatwo dostępne zawory odcinające dopływ mediów do urządzenia.

6.2 Uwagi do stosowania

Po wybudzeniu wanny z trybu hibernacji za pomocą przycisku START i po napełnieniu jej wodą, możliwe jest zauważalne drganie tafli wody. Jest to normalne zjawisko wynikające z zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, które nie wpływa na poprawne funkcjonowanie wanny, zaś w trakcie zabiegu jest nieodczuwalne.

Warunkiem przeprowadzania zabiegów w wannie do automatycznego hydromasażu strefowego jest wymiana wody po każdym pacjencie.

Zakres temperatury wody jest ograniczony na baterii termostatycznej do 38°C przez blokadę bezpieczeństwa. W celu podwyższenia temperatury wody powyżej 38°C można przejść poza ogranicznik temperatury przez odblokowanie zabezpieczenia.

Nie należy przekraczać temperatury wody zabiegowej w wannie powyżej 41°C ze względu, że może dojść do poparzeń pacjenta lub innych zagrożeń wynikających ze zbyt wysokiej temperatury wody.