

5 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

5.1 Miejsce eksploatacji



UWAGA!

Ze względów sanitarnych niezalecane jest stałe połączenie instalacji odpływowej wanny z instalacją kanalizacyjną budynku.



UWAGA!

Zalecane jest, aby w pomieszczeniu umieścić dodatkowe, łatwo dostępne zawory odcinające dopływ mediów do urządzenia.



UWAGA!

Pomieszczenia, w których prowadzone są zabiegi powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną nawiewno-wyiewną zapewniającą zwiększoną wymianę powietrza przekraczającą dwukrotną wymianę na godzinę.

5.2 Uwagi do stosowania



UWAGA!

Warunkiem przeprowadzania zabiegów w wannie AQUARAY, AQUARAY Balneo jest wymiana wody po każdym pacjencie.



UWAGA!

Napełniając wannę wodą należy pamiętać, żeby najpierw napełniać wannę zimną wodą, a następnie uzupełnić ciepłą wodą do żądanej temperatury.



UWAGA!

Nie należy przekraczać temperatury wody zabiegowej w wannie powyżej 40°C, gdyż może dojść do poparzenia pacjenta lub powstania innych zagrożeń wynikających ze zbyt wysokiej temperatury wody.