

4. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

4.1 Miejsce eksploatacji



UWAGA!

Ze względów sanitarnych niezalecane jest stałe połączenie instalacji odpływowej wanny z instalacją kanalizacyjną budynku.



UWAGA!

Zalecane jest, aby w pomieszczeniu umieścić dodatkowe i łatwo dostępne zawory odcinające dopływ wody ciepłej i zimnej do urządzenia, tak aby umożliwić szybki dostęp personelu do zaworów odcinających w przypadku awarii instalacji lub niekontrolowanemu wyciekowi wody z instalacji urządzenia.

Montaż i pierwsze uruchomienie urządzenia przeprowadza serwis wykonawcy lub upoważnionej przez wykonawcę jednostki.

4.2 Uwagi do stosowania



UWAGA!


Warunkiem przeprowadzania kąpieli w wannie Bathaid jest wymiana wody oraz przeprowadzona dezynfekcja wanny po każdym pacjencie.



UWAGA!

Nie należy przekraczać temperatury wody kąpielowej w wannie powyżej 40°C ze względu, że może dojść do poparzeń pacjenta lub innych zagrożeń wynikających ze zbyt wysokiej temperatury wody.

5. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

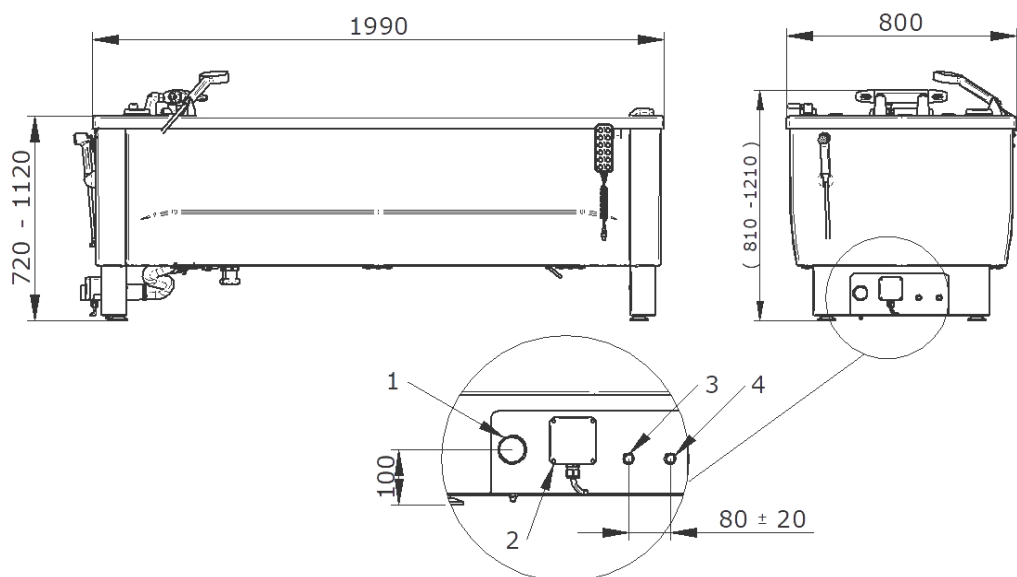

Rys.4. Gabaryty wanny Bathaid (wymiar w mm)

- 1 - wyprowadzony odpływ wody z wanny zakończony rurą $\phi 50$ L=60 mm
- 2 - puszka przyłączeniowa zespołu zaciskowego sieciowego
- 3 - przyłącze zimnej wody w wannie zakończone GZ 1/2" L=30mm
- 4 - przyłącze ciepłej wody w wannie zakończone GZ 1/2" L=30mm