

	Znak ostrzegawczy. W ten sposób oznaczono czynności, których wykonanie niezgodnie z treścią niniejszej Instrukcji Obsługi może spowodować pogorszenie warunków lub zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkownika i/lub personelu obsługującego wannę. Podobne oznaczenie naniesiono na urządzeniu tam, gdzie należy bezwzględnie zapoznać się treścią Instrukcji Obsługi i przestrzegać jej zaleceń przy użytkowaniu urządzenia.
	Część aplikacyjna typ B
	Oznaczenie maksymalnego bezpiecznego obciążenia wanny
IPX5	Ochrona przed strugą wody laną z każdej strony obudowy
MAX 6 bar	Maksymalne znamionowe ciśnienie doprowadzonej wody
„CO2”	Przylącze wody nasyconej CO ₂ – opcja dotyczy tylko ORIONMED Balneo
	Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie zabronione jest wyrzucanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do właściwego punktu zbiórki. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Zużyty sprzęt nielektryczny utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Numer seryjny
	Producent, RRRR – rok produkcji
	Numer katalogowy

5. Środki bezpieczeństwa

5.1 Miejsce eksploatacji

UWAGA!



Ze względów sanitarnych niezalecane jest stałe połączenie instalacji odpływowej wanny z instalacją kanalizacyjną budynku, ponieważ w przypadku niewydolności lub awarii instalacji kanalizacyjnej istnieje zagrożenie bakteriologiczne ściekami z innych urządzeń.

UWAGA!



Zalecane jest, aby w pomieszczeniu umieścić dodatkowe, łatwo dostępne zawory odcinające dopływ mediów do urządzenia.

UWAGA!



Pomieszczenia, w których prowadzone są zabiegi balneologiczne powinny być wyposażone w dolne przelewy gazowe oraz w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z wyciągiem dolnym zapewniającą zwiększoną wymianę powietrza przekraczającą dwukrotną wymianę na godzinę.

Wanna jest wykonywana odpowiednio do lokalizacji i warunków montażu, wskazanych przez użytkownika.

Montaż i pierwsze uruchomienie wanny przeprowadza serwis wykonawcy lub upoważnionej przez wykonawcę jednostki.

5.2 Uwagi do stosowania



UWAGA!

Warunkiem przeprowadzania zabiegów w wannie do automatycznego hydromasażu strefowego jest wymiana wody po każdym pacjencie.



UWAGA!

Napełniając wannę wodą należy pamiętać, że najpierw napełniać wannę zimną wodą, a następnie uzupełnić ciepłą wodą do żądanej temperatury.



UWAGA!

Nie należy przekraczać temperatury wody zabiegowej w wannie powyżej 40°C, gdyż może dojść do poparzeń pacjenta lub innych zagrożeń wynikających ze zbyt wysokiej temperatury wody.

6. OBSŁUGA WANNY


6.1 Ekran powitalny



Po włączeniu zasilania urządzenia wyświetlany jest ekran powitalny.

Dioda LED miga kolorem niebieskim.

6.2 Widok pulpitu

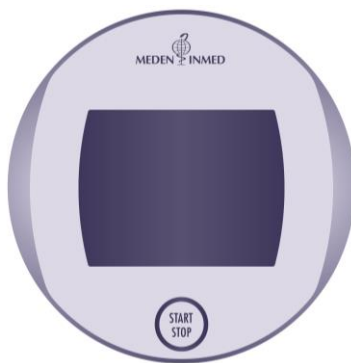

Naciśnięcie przycisku START/STOP spowoduje przejście do trybu ustawień kąpieli i wyświetlenie Ekranu głównego ustawień.

Uwaga: Po 15 min. bezczynności pulpit wanny przechodzi w stan uśpienia, wyświetlacz LCD zostaje wygaszony, dioda miga kolorem niebieskim w odstępach co 5 sekund, sygnalizując obecność zasilania. Powrót ze stanu uśpienia odbywa się przez naciśnięcie przycisku START/STOP.