

## 4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



### UWAGA!

Podnośnik odciążający ELEVEO posiadają ograniczoną zdolność obciążeniową. Masa pacjenta przy unoszeniu-opuszczaniu oraz w czasie trwania zabiegu odciążania nie powinna przekraczać 160 kg.



### UWAGA!

Nie należy dopuszczać do kontaktu (zalania) płynami (np. kawa, herbata, woda, środki myjące i dezynfekujące) sterownika umieszczonego na kolumnie.



### UWAGA!

Urządzenie wykorzystuje specjalną uprząż do obsługi pacjenta. Istotne jest, aby uprząż była odpowiednio dopasowana do pacjenta.



### UWAGA!

Przed rozpoczęciem zabiegu, należy zamocować uprząż do podnośnika przez opuszczenie ramienia odciążającego do optymalnego położenia i zablokowanie kółek jezdnych. Po zakończonym zabiegu, należy wykonać demontaż upręży przez zablokowanie kółek jezdnych i opuszczenie ramienia odciążającego do optymalnego położenia.



### UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego (niezgodnego z warunkami określonymi w niniejszej instrukcji obsługi) użytkowania podnośnika ELEVEO.



### UWAGA!

Podnośnika nie należy eksploatować w pomieszczeniach o dużej wilgotności względnej powietrza, w szczególności w pomieszczeniach przeznaczonych do zabiegów hydroterapii.



### UWAGA!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika należy zachować minimalną wysokość pomieszczenia wynoszącą minimum 2,5m.

## 5. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA



### UWAGA!

Do montażu urządzenia potrzebne są dwie osoby.

### 5.1. Warunki lokalizacji



### UWAGA!

Przy ustalaniu lub zmianie miejsca użytkowania podnośnika ELEVEO należy zwrócić szczególną uwagę, aby w przestrzeni pod ramą nie znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Należy uniemożliwić niekontrolowany dostęp do miejsca użytkowania podnośnika dzieciom, a także zwierzętom domowym (kot, pies itp.).

Miejsce eksploatacji podnośnika odciążającego należy wybrać tak, aby po jego ustawieniu z każdej strony pozostała przestrzeń o szerokości minimum 80 cm oraz było na tyle miejsca przed i za podnośnikiem, aby mógł się swobodnie przemieszczać. Podnośnik należy ustawiać i używać wyłącznie na poziomych i równych powierzchniach.

Po wyjęciu poszczególnych zespołów podnośnika z opakowania zbiorczego i rozpakowaniu ich z folii transportowej, w celu złożenia kompletnego wyrobu, należy postępować wg dołączonej instrukcją montażu i pakowania. Po wykonaniu właściwych czynności montażowych i wstępnym ustawieniu podnośnika ELEVEO, można przystąpić do pracy.