

3.4. Przechowywanie

Warunki klimatyczne pomieszczenia powinny zawierać się w przedziałach:

1. Temperatura otoczenia: $5 \div 40^{\circ}\text{C}$ (zalecane 20°C lub mniej).
2. Wilgotność powietrza: $20 \div 80\%$ (bez kondensacji pary wodnej).
3. Ciśnienie powietrza: $700 \div 1060$ hPa.

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Nie wolno korzystać z wyrobu podczas ładowania akumulatora.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.



UWAGA!

Zabronione jest jakiegokolwiek modyfikowanie urządzenia bez pisemnego upoważnienia producenta.

Podczas użytkowania podnośnika HYDRAID należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

1. Należy używać wyłącznie podnośnika wannowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Należy zachować bezpieczny odstęp od mechanizmów podnośnika podczas działania urządzenia. Ruchome elementy stwarzają zagrożenie zgniecenia.
3. Podnośnikiem może sterować personel medyczny poinstruowany na temat jego obsługi i mający odpowiednią wiedzę fachową.
4. Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi w celu uniknięcia uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego działania lub innych zagrożeń. Instrukcja zawiera ważne informacje i niezbędne instrukcje.
5. Przed każdym użyciem podnośnika upewnij się, czy jest on w dobrym stanie (p.8).
6. Konserwację oraz naprawy podnośnika powinien wykonywać serwis.
7. Przed użyciem podnośnika należy ocenić, czy pacjent może korzystać z pomocy urządzenia (omdlenie, itp.).
8. Należy upewnić się, że wilgoć nie przenika do układu elektrycznego. Ochrona IPX6 jest ważna tylko wtedy, gdy akumulator jest zainstalowany.
9. Ładować akumulator w dobrze wentylowanym miejscu.
10. Nie zostawiać dzieci samych przy urządzeniu. W razie konieczności, wymontować akumulator. Podnośnik wannowy to nie zabawka.
11. Nie zostawiać pacjenta korzystającego z urządzenia bez nadzoru. W przypadku utraty przytomności pacjent może wypaść.
12. W przypadku występowania nietypowych dźwięków, zaprzestać z korzystania z urządzenia, wyjąć akumulator i skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.