

4. OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Zabronione jest jakiejkolwiek modyfikowanie urządzenia bez pisemnego upoważnienia Producenta.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.



UWAGA!

W wyniku niepoprawnego użytkowania urządzenia może dojść do zmęczenia materiałów części konstrukcyjnych, co może spowodować zerwania spójności części urządzenia.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek skrzywień konstrukcji, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem producenta.

Podczas użytkowania podnośnika pacjenta LEVITOP należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

1. Należy używać podnośnika pacjenta wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Należy zachować bezpieczny odstęp od mechanizmów podnośnika podczas działania urządzenia. Ruchome elementy stwarzają zagrożenie zgniecenia.
3. Podnośnikiem może sterować personel medyczny.
4. Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi w celu uniknięcia uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego działania lub innych zagrożeń. Instrukcja zawiera ważne informacje i niezbędne instrukcje.
5. Przed każdym użyciem podnośnika upewnij się, czy jest on w dobrym stanie (p.p.9).
6. Konserwację oraz naprawy podnośnika powinien wykonywać serwis.
7. Przed użyciem podnośnika należy ocenić, czy pacjent może korzystać z pomocy urządzenia (omdlenia itp.).
8. W przypadku różnic między maksymalnym obciążeniem podnośnika i podwieszki, ważne jest najniższe maksymalne obciążenie, definiuje bezpieczne obciążenie robocze całego systemu.
9. Upewnić się, że wilgoć nie przenika do układu elektrycznego. Ochrona IPX4 jest ważna tylko wtedy, gdy akumulator jest podłączony (p.p.6.5).
10. Ładować akumulator w dobrze wentylowanym miejscu.
11. Nie zostawiać dzieci samych przy urządzeniu. W konieczności, wymontować akumulator. Podnośnik pacjenta to nie zabawka.
12. Nie zostawiać pacjenta korzystającego z urządzenia bez nadzoru. Pacjent może wypaść (utrata przytomności).
13. W przypadku występowania nietypowych dźwięków zaprzestać korzystania z urządzenia, wyjąć akumulator i skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.