

3.8. Przechowywanie

Urządzenie powinno być przechowywane w najchłodniejszym i najmniej wilgotnym pomieszczeniu.

Warunki klimatyczne pomieszczenia powinny zawierać się w przedziałach:

1. Temperatura otoczenia: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$ (zalecane 20°C lub mniej).
2. Wilgotność powietrza: $30 \div 75\%$.
3. Ciśnienie powietrza: $700 \div 1060 \text{ hPa}$.

Konstrukcja podnośnika z zawiesiem 2-punktowym umożliwia składanie urządzenia w celu przechowywania lub transportu.

Procedura została opisana w punkcie 3.7.

4. OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Zabronione jest jakiegokolwiek modyfikowanie urządzenia bez pisemnego upoważnienia Producenta.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.



UWAGA!

W wyniku niepoprawnego użytkowania urządzenia może dojść do zmęczenia materiałów części konstrukcyjnych, co może spowodować zerwania spójności części urządzenia.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek skrzywień konstrukcji, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem producenta.

Podczas użytkowania podnośnika pacjenta Lifteo ELA, MLA należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

1. Należy używać wyłącznie podnośnika pacjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Należy zachować bezpieczny odstęp od mechanizmów podnośnika podczas działania urządzenia. Ruchome elementy stwarzają zagrożenie zgniecenia.
3. Podnośnik może obsługiwać wykwalifikowany personel medyczny.
4. Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać dokładnie całą instrukcję obsługi w celu uniknięcia błędów użytkowania, niechcianych uszkodzeń oraz innych zagrożeń. Instrukcja zawiera ważne i niezbędne informacje dotyczące prawidłowej obsługi urządzenia.
5. Przed każdym użyciem podnośnika upewnij się, czy jest on w dobrym stanie (p.p.9.1, 9.2).
6. Konserwację oraz naprawy podnośnika powinien wykonywać serwis.
7. Przed użyciem podnośnika należy ocenić, czy pacjent może korzystać z pomocy urządzenia (omdlenia itp.).
8. W przypadku różnic między maksymalnym obciążeniem podnośnika i podwieszki, ważne jest najniższe maksymalne obciążenie, określające bezpieczne obciążenie robocze urządzenia.
9. Upewnić się, że wilgoć nie przenika do układu elektrycznego. Ochrona IPX4 jest ważna tylko wtedy, gdy akumulator jest podłączony (p.p.6.8).

10. Ładować akumulator w dobrze wentylowanym miejscu.
11. Nie należy zostawiać dzieci samych przy urządzeniu. W konieczności wymontować akumulator. Podnośnik pacjenta to nie zabawka.
12. Nie zostawiać pacjenta korzystającego z urządzenia bez nadzoru. W przypadku utraty przytomności pacjent może wypaść.
13. W przypadku występowania nietypowych dźwięków zaprzestać z korzystania z urządzenia, wyjąć akumulator i skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

5. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO UŻYTKOWANIA



UWAGA!

Podczas korzystania z urządzenia nie należy stawać na nogi urządzenia. Podczas ich ruchu mogłoby dojść do uszczerbku na zdrowiu. Należy również zachować odpowiednie odległości do systemu rozchylania nóg urządzenia.



UWAGA!

Ramię podnoszące należy podnosić jedynie przy pomocy siłownika. Ręczne podnoszenie ramienia może spowodować uszkodzenie siłownika.



UWAGA!

Nie używać podnośnika w środowisku, gdzie eksploatowane są inne urządzenia emitujące energię o częstotliwości radiowej. Układ sterowania podnośnika podczas normalnej pracy, jak każde urządzenie elektroniczne generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli podnośnik nie jest używany zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia dla innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Producent podnośnika nie gwarantuje, że zakłócenia nie wystąpią również podczas jego szczególnej lokalizacji. Aby sprawdzić, czy jest źródłem zakłóceń dla innych urządzeń, należy zmienić jego położenie lub odłączyć akumulator od urządzenia. Można spróbować skorygować wpływ zakłóceń za pomocą następujących czynności: zmienić strefę użytkowania podnośnika, zwiększyć jego odległość względem zakłócanego urządzenia lub skonsultować się z serwisem.



UWAGA!

Dozwolone jest korzystanie z urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak, łazienka. Urządzenie nie nadaje się do pracy pod prysznicem. Warunki klimatyczne powinny mieścić się w zakresie:

- temperatura otoczenia: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$;
- wilgotność powietrza: $30 \div 75\%$;
- ciśnienie powietrza: $700 \div 1060 \text{ hPa}$.



UWAGA!

Należy unikać mocnego nasłonecznienia podnośnika.

UWAGA!

Obciążenie wywoływane przez pacjenta na zawieszę zawsze musi być rozłożone równomiernie.

