

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Zabronione jest jakiegokolwiek modyfikowanie urządzenia bez pisemnego upoważnienia producenta.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.



UWAGA!

W wyniku niepoprawnego użytkowania urządzenia może dojść do zmęczenia materiałów części konstrukcyjnych, co może spowodować zerwania spójności części urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek skrzywień konstrukcji, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem producenta.

Podczas użytkowania podnośnika PatiHoist należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

1. Należy używać wyłącznie podnośnika pacjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Należy zachować bezpieczny odstęp od mechanizmów podnośnika podczas działania urządzenia. Ruchome elementy stwarzają zagrożenie zgniecenia.
3. Podnośnikiem może sterować personel medyczny poinstruowany na temat jego obsługi i mający odpowiednią wiedzę fachową.
4. Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi w celu uniknięcia uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego działania lub innych zagrożeń. Instrukcja zawiera ważne informacje i niezbędne instrukcje.
5. Przed każdym użyciem podnośnika upewnij się, czy jest on w dobrym stanie (p.p.9.1, 9.2);
6. Konserwację oraz naprawy podnośnika powinien wykonywać serwis.
7. Przed użyciem podnośnika należy ocenić, czy pacjent może korzystać z pomocy urządzenia (omdlenie itp.).
8. W przypadku różnic między maksymalnym obciążeniem podnośnika i podwieszki, ważne jest najniższe maksymalne obciążenie.
9. Upewnić się, że wilgoć nie przenika do układu elektrycznego. Ochrona IPX4 jest ważna tylko wtedy, gdy osłona górna sterownika jest zamknięta (p.p.6.6).
10. Ładować akumulator w dobrze wentylowanym miejscu.
11. Nie zostawiać dzieci samych przy urządzeniu. W razie konieczności, wymontować akumulator. Podnośnik pacjenta to nie zabawka.
12. Nie zostawiać pacjenta korzystającego z urządzenia bez nadzoru. W przypadku utraty przytomności pacjent może wypaść.
13. W przypadku występowania nietypowych dźwięków, zaprzestać z korzystania z urządzenia, wyjąć akumulator i skontaktować się z autoryzowanym dealermem.