

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie urządzenia bez pisemnego upoważnienia Producenta.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Podczas użytkowania podnośnika pionizującego pacjenta Verteo należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

- Należy używać podnośnika pacjenta wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem;
- Należy zachować bezpieczny odstęp od mechanizmów podnośnika podczas działania urządzenia. Ruchome elementy stwarzają zagrożenie zgniecenia;
- Podnośnikiem może sterować personel medyczny;
- Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi w celu uniknięcia uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego działania lub innych zagrożeń. Instrukcja zawiera ważne informacje i niezbędne instrukcje;
- Przed każdym użyciem podnośnika upewnij się, czy jest on w dobrym stanie (p.p.8.1, 8.2);
- Konserwację oraz naprawy podnośnika powinien wykonywać serwis;
- Przed użyciem podnośnika należy ocenić czy pacjent może korzystać z pomocy urządzenia (omdlenia itp.);
- W przypadku różnic między maksymalnym obciążeniem podnośnika i podwieszki pionizującej, ważne jest najniższe maksymalne obciążenie, definiuje bezpieczne obciążenie robocze całego systemu;
- Upewnić się, że wilgoć nie przenika do układu elektrycznego. Ochrona IPX4 jest ważna tylko wtedy gdy akumulator jest podłączony (p.p.6.7);
- Ładować akumulator w dobrze wentylowanym miejscu;
- Nie zostawiać dzieci samych przy urządzeniu. W razie konieczności, wymontować akumulator. Podnośnik pionizujący to nie zabawka.
- Nie zostawiać pacjenta korzystającego z urządzenia bez nadzoru. Pacjent może wypaść;
- W przypadku występowania nietypowych dźwięków, zaprzestać z korzystania z urządzenia, wyjąć akumulator i skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.