

3.3. Pakowanie i transport

Transport urządzenia przebiega w kartonowym opakowaniu. Dopuszcza się sztaplowanie urządzenia do transportu, w co najwyżej 2 warstwach paletowych. Paleta będzie przygotowana zgodnie z instrukcją pakowania. Urządzenie zabezpieczone jest profilami poliuretanowymi, folią „bąbelkową” oraz folią „stretch”.

W trakcie przemieszczania podnośnika w pomieszczeniach należy działać w taki sposób, aby nie narażać jego krawędzi zewnętrznych na uderzenia i otarcia.

3.4. Przechowywanie

Wyrób powinien być przechowywany w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Warunki klimatyczne pomieszczenia powinny zawierać się w przedziałach:

- Temperatura otoczenia: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$ (zalecane 20°C lub mniej);
- Wilgotność powietrza: $30 \div 75\%$;
- Ciśnienie powietrza: $700 \div 1060 \text{ hPa}$.

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie wyrobu bez pisemnego upoważnienia producenta.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji wyrobu, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.



UWAGA!

Nie należy używać mobilnego podnośnika pacjenta VertiHelp na powierzchniach z przeszkodami takimi jak schody lub progi.



UWAGA!

Nie wolno stosować podnośnika do innych celów niż przenoszenie pacjenta.



UWAGA!

Podczas korzystania z wyrobu nie należy stawać na nogi urządzenia. Podczas ich ruchu mogłoby dojść do uszczerbku na zdrowiu. Należy również zachować odpowiednie odległości do zastosowania systemu rozchylania nóg wyrobu.



UWAGA!

Dozwolone jest korzystanie z wyrobu w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak, łazienka. Wyrób nie nadaje się do pracy pod prysznicem. Należy unikać pomieszczeń zaparowanych. Warunki klimatyczne powinny mieścić się w zakresie:

- temperatura otoczenia: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$;
- wilgotność powietrza: $30 \div 75\%$;
- ciśnienie powietrza: $700 \div 1060 \text{ hPa}$.



UWAGA!

Należy unikać mocnego nasłonecznienia podnośnika.

Podczas użytkowania podnośnika pacjenta VertiHelp należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

1. Wyrobu należy używać wyłącznie z jego przeznaczeniem.
2. Obsługa podnośnika powinna odbywać się przez personel medyczny (asystent) lub osobę, która zapoznała się z instrukcją obsługi.
3. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi w celu uniknięcia uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego działania lub innych zagrożeń. Instrukcja obsługi zawiera ważne i niezbędne informacje.
4. Przed pierwszym użyciem wyrobu, należy zapoznać się z działaniem poszczególnych funkcji podnośnika wskazanych w p.6. Sprawdzenie to powinno się odbywać bez pacjenta.
5. Maksymalna masa pacjenta nie może być większa niż maksymalne obciążenie podnośnika.
6. Przed użyciem podnośnika, należy ocenić, czy pacjenta jest świadomy, przytomny i czy może korzystać z pomocy wyrobu.
7. Nie zostawiać dzieci samych przy wyrobie.
8. Z wyrobu nie powinni korzystać pacjenci, którzy nie kontrolują swoich ruchów.
9. Nie zostawiać pacjenta bez opieki w trakcie korzystania z wyrobu. W przypadku utraty przytomności pacjent może upaść.
10. Podnośnik VertiHelp należy pchać z prędkością wolnego spaceru.
11. Konserwację oraz naprawy podnośnika powinien wykonywać serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta.
12. W przypadku występowania nietypowych dźwięków należy zaprzestać korzystania z wyrobu i skontaktować się z serwisem.

5. CZYNNOŚCI PRZY OBSŁUDZE

5.1. Miejsce eksploatacji



UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z zasadami i przepisami określonymi w instrukcji obsługi) użytkowania wyrobu.

Miejsce eksploatacji mobilnego podnośnika powinno być tak dobrane, aby po ustawieniu wyrobu z każdej jego strony było miejsce na ruch. Na rysunku 3 przedstawiono średnicę skrętu wyrobu.