

5. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

5.1 Miejsce eksploatacji



UWAGA!

Urządzenie AQUAMOBIL jest przystosowane do pracy z czystą bieżącą wodą użytkową.

Do przeprowadzenia masażu podwodnego niezbędna jest niecka (wanna) lub inny zbiornik terapeutyczny, z którego pompa urządzenia AQUAMOBIL będzie zasysać wodę w obiegu zamkniętym.

Montaż i pierwsze uruchomienie urządzenia przeprowadza serwis wykonawcy lub upoważnionej przez wykonawcę jednostki.

6. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

6.1 Podłączenie do sieci elektrycznej 230 V~50 Hz



UWAGA!

Podłączenia układu elektrycznego urządzenia AQUAMOBIL do sieci zasilania 230V~50Hz powinien dokonać elektryk z uprawnieniami. Jednym z warunków gwarancyjnych jest potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia elektrycznego urządzenia przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne w tym zakresie.



UWAGA!

Urządzenie AQUAMOBIL musi być przyłączone do instalacji elektrycznej na stałe.



UWAGA

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym urządzenie AQUAMOBIL musi być przyłączone wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym.



UWAGA!

Do niezawodnego i zupełnego odłączenia układu zasilania od sieci zasilającej, służy zewnętrzny wyłącznik zasilania zainstalowany w rozdzielnicy, z której jest doprowadzane do urządzenia zasilanie sieciowe.

Obwód zasilania musi być wydzielony tylko dla zasilania tego urządzenia (nie może zasilac żadnych innych urządzeń) i musi zawierać:

- wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie różnicowym $\leq 30\text{mA}$;
- wyłącznik zasilania, rozłączający jednocześnie wszystkie bieguny, zapewniający odstęp między stykami przynajmniej 3 mm, umieszczony w miejscu umożliwiającym łatwy i szybki dostęp personelu w przypadkach awaryjnych. Jeżeli wyłącznik nie jest widoczny z pozycji normalnego użytkownika przez operatora lub personel serwisowy, należy zapewnić dodatkowe środki pozwalające na jego zablokowanie w pozycji wyłączonej.
- przekrój przewodu zasilającego o średnicy $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$.