

8. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Urządzenie pozwala uzyskać masę borowinową w odpowiedniej konsystencji, której temperatura może wynosić od 30 °C do 60 °C.



UWAGA!

Zakaz operacji przy poruszającym się mieszadle. Zawsze sprawdzać wyłączenie mieszadła po podniesieniu pokrywy. Nie wkładać rąk do zbiornika



UWAGA!

Całkowite opróżnianie i czyszczenie zbiornika należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.



UWAGA!

Komunikat **E** z cyfrą **1, 2, ...** oznacza niewłaściwą pracę urządzenia lub chwilowy zanik prądu. Jeżeli po naciśnięciu przycisku **START/STOP** pojawia się ciągle lub po pewnej chwili jakkolwiek komunikat z literą **E...**, to należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie z użytkowania i nawiązać kontakt z serwisem.



UWAGA!


Raz na kwartał należy udrożnić otwory w kratce osłony wentylatora silnika na ścianie tylnej obudowy. Przed przystąpieniem do czyszczenia osłony wentylatora, należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania.



UWAGA!

Minimalny poziom masy w zbiorniku wyznacza poziom wyższej łopatkki mieszadła, jak pokazano na ilustracji poniżej.

Poziom minimalny

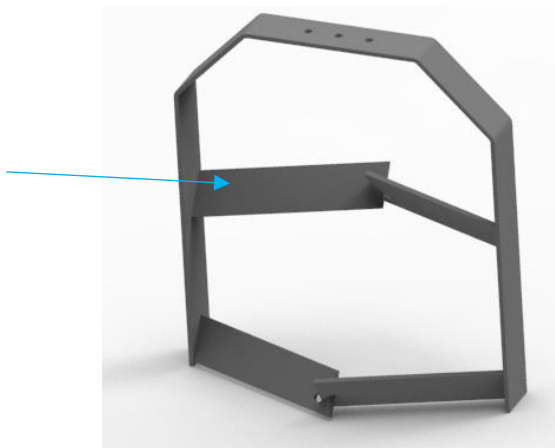

Rysunek 4 – Poziom minimalny w mieszalniku