

8. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Urządzenie pozwala uzyskać masę fango lub parafinową w stanie półpłynnym, której temperatura może wynosić od 55°C do 80°C, a w przypadku sterylizacji masy nawet do 130°C dla masy fango i 110°C dla masy parafinowej.

Należy zachować szczególną ostrożność przy manipulacjach z gorącą masą fango i parafinową, aby uniknąć poparzenia.



UWAGA!

Zakaz operacji przy poruszającym się mieszadle. Zawsze sprawdzać wyłączenie mieszadła po podniesieniu pokrywy. Nie wkładać rąk do zbiornika.



UWAGA!

Całkowite opróżnianie i czyszczenie zbiornika należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.



UWAGA!

Komunikat błędu E z numerem 1, 2 i 3 oznacza wystąpienie chwilowego braku zasilania lub silnego zakłócenia.


Komunikaty błędu E z numerami wyższymi od 3 sygnalizują wystąpienie problemu w pracy urządzenia. W przypadku niemożności skasowania komunikatu z takim numerem przez naciśnięcie przycisku „**START-STOP**”, należy zanotować numer błędu, niezwłocznie wyłączyć urządzenie z użytkowania i skontaktować się z serwisem.



UWAGA!

Minimalny poziom masy w zbiorniku wyznacza poziom wyższej łopatkii mieszadła, jak pokazano na ilustracji poniżej.

Poziom minimalny

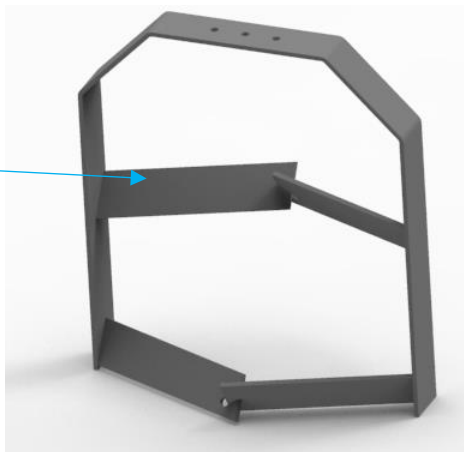

Rysunek 4 – Poziom minimalny masy w mieszalniku