

## 4 Środki bezpieczeństwa



### UWAGA!

Zabrania się siadania na podłokietniku, ponieważ istnieje ryzyko upadku.



### UWAGA!

Nie należy gwałtownie hamować podczas korzystania z chodzika, szczególnie po pochyłym podłożu, ze względu na ryzyko upadku.



### UWAGA!

Chodzik przystosowany jest do pracy na płaskich powierzchniach, wszelkie przeszkody lub nierówności należy ominąć przejeżdżając obok, najechanie na przeszkodę grozi upadkiem.



### UWAGA!

Podczas korzystania z chodzika na pochyłym podłożu, wymagana jest obecność dodatkowej, co najmniej jednej osoby, ponieważ istnieje ryzyko upadku.



### UWAGA!

Zabrania się poruszania chodzikiem po schodach, jeżeli istnieje konieczność przejścia po schodach należy chodzik przenieść.



### UWAGA!

Korzystanie z chodzika na podłożu nie dającym pewnej przyczepności dla kół jezdnych, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaszczonym jest niedopuszczalne ze względu na ryzyko upadku.



### UWAGA!

Podczas postoju chodzika należy uruchomić blokady obu kół tylnych.

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy:

1. Ustawić położenie podłokietników poprzez regulację ich położenia. Następnie upewnić się, że położenie zostało zablokowane tak, aby podczas pracy z chodzikiem samoistnie nie uległy przemieszczeniu.
2. Sprawdzić poprawność zamocowania ramy dolnej z rama górną (sprawdzić, czy śruby są dokręcone).
3. Sprawdzić poprawność zamocowania kółek (czy pewnie są osadzone do ramy dolnej) oraz czy swobodnie się obracają.
4. Sprawdzić skuteczność działania blokady kółek.

W trakcie poruszania się używając chodzika, należy uważać, aby nie narażać krawędzi zewnętrznych chodzika na uderzenia i otarcia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego (niezgodnego z warunkami określonymi w niniejszej Instrukcji Obsługi) użytkowania chodzika FREEWALKER.

## 5 Czynności przy obsłudze

### 5.1 Koła z blokadą

W celu aktywacji blokady kółek należy przesunąć dźwignię (rys.6 poz. 3) w dół umieszczoną w tylnych kołach (rys.6 poz.2). Aby zwolnić blokadę należy przestawić położenie dźwigni w górę.