

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Oczekiwany okres użyteczności urządzenia wynosi 7 lat. Po upływie 7 lat od daty produkcji urządzenia (i jego wyposażenia) Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady urządzenia (i jego wyposażenia) oraz wynikające z tego konsekwencje.



UWAGA!

Zabronione jest jakiegokolwiek modyfikowanie urządzenia bez pisemnego upoważnienia Producenta.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.



UWAGA!

Wózek zawsze należy parkować na płaskiej powierzchni i zablokować hamulce w kołach.

4.1. Przemieszczanie



UWAGA!

Przed przemieszczaniem wózka należy upewnić się, że sprzęt znajdujący się na półkach został zabezpieczony przed przesuwaniem się, a przewód zasilający sprzęt został odłączony i umocowany w sposób bezpieczny na wózku.



UWAGA!

Podczas przemieszczania wózka zachować szczególną ostrożność.



UWAGA!

Maksymalny kąt pochylenia podłoża, po jakim może przemieszczać się wózek to kąt 5°.

4.2. Czyszczenie i dezynfekcja

1. Metalowe części konstrukcji można czyścić przy użyciu miękkiej, wilgotnej szmatki. Każdorazowo oczyszczone powierzchnie należy wytrzeć do sucha. Nie należy stosować środków czyszczących zawierających alkohol.
2. Dezynfekować powierzchnie można przy użyciu środka np. typu Incidin Foam.
3. Nie należy stosować:
 - past, wosków sprayów,
 - silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

Użycie niedozwolonych środków do czyszczenia i dezynfekcji może spowodować ścieranie się i zmianę struktury powierzchni, niepodlegające warunkom gwarancji.

4.3. Konserwacja

Okresowo - raz na pół roku - należy wykonywać przegląd połączeń gwintowanych i w razie potrzeby usuwać pojawiające się luzy. Wszelkie niedające się usunąć luzy połączeń należy zgłosić do serwisu producenta, zaprzestając eksploatacji wyrobu do czasu usunięcia ich przyczyny.

Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli autoryzowane punkty serwisowe lub firmy medyczne nie będą używały oryginalnych części zamiennych lub oryginalnego wyposażenia.

Kontakt z serwisem:

Meden-Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

serwis: tel. (94) 344 – 90 – 48

e-mail: serwis-wrh@meden.com.pl