

4 Ogólne środki bezpieczeństwa



UWAGA!

Zabronione jest jakiegokolwiek modyfikowanie wyrobu bez pisemnego upoważnienia producenta.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.



UWAGA!

Nie wolno korzystać z wyrobu podczas ładowania akumulatora.

Podczas użytkowania mobilnego krzesła do higieny z regulacją pozycji MoHiCan II należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

1. Wyrobu należy używać wyłącznie z jego przeznaczeniem.
2. Należy zachować bezpieczny odstęp od mechanizmów podczas działania wyrobu. Ruchome elementy stwarzają zagrożenie zgniecenia.
3. Wyrób obsługuje personel, który zapoznał się z instrukcją obsługi i posiada odpowiednią wiedzę fachową.
4. Przed uruchomieniem wyrobu należy przeczytać instrukcję obsługi w celu uniknięcia uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego działania lub innych zagrożeń. Instrukcja zawiera ważne i niezbędne informacje.
5. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń.
6. Konserwacja oraz naprawy powinny być wykonywane przez fabryczny lub autoryzowany serwis.
7. Przed użyciem MoHiCan II należy ocenić, czy pacjent może korzystać z pomocy wyrobu.
8. Upewnić się, że wilgoć nie przenika do układu elektrycznego.
9. Ładować akumulator w dobrze wentylowanym miejscu.
10. Nie zostawiać dzieci samych przy wyrobie, w razie konieczności wymontować akumulator.
11. Nie wolno zostawić pacjenta bez opieki w trakcie korzystania z wyrobu. W przypadku utraty przytomności pacjent może wypaść.
12. W przypadku występowania nietypowych dźwięków, zaprzestać z korzystania z wyrobu, wyjąć akumulator i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.