

4. Środki bezpieczeństwa

Uwaga!



Stanowisko Neuroforma nie jest przystosowane do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Uwaga!



Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym urządzenie musi być przyłączone wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym.

Uwaga!



Przed przemieszczaniem stanowiska należy upewnić się, że przewód zasilający został odłączony, a sprzęt znajdujący się na półkach został zabezpieczony przed przesuwaniem się.

Uwaga!



Podczas przemieszczania stanowiska zachować szczególną ostrożność.

Uwaga!



Maksymalny kąt pochylenia podłoża, po jakim może przemieszczać się stanowisko to kąt 5°.

Uwaga!



Ze względów bezpieczeństwa przejazd stanowiskiem na pochyłych powierzchniach powinien być wykonywany przez co najmniej dwie osoby.

Uwaga!



Zabrania się podnoszenia stanowiska za uchwyt przeznaczony do przemieszczania.

5. Przygotowanie do użytkowania

5.1 Montaż i demontaż

Uwaga!



Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego.

Uwaga!



Zaleca się, aby przy montażu stanowiska obecne były dwie osoby.

Uwaga!



Dostęp do pokrywy obudowy monitora powinien mieć tylko personel.