

Zestaw instalacyjny: trzpień z gwintem, trzpień bez gwintu, podkładka x2, śruba x1	1 kpl.
Pokrowiec na siedzisko	2 szt.
Poduszka na oparcie	1 szt.

Tabela 3 - Komplektacja urządzenia do treningu i wspomagania terapii mięśni dna miednicy PelvicTutor

3.3. Transport

Transport urządzenia przebiega w kartonowym opakowaniu na palecie. Krawędzie zewnętrzne urządzenia są dodatkowo zabezpieczone za pomocą profili z pianki, folii „bąbelkowej” oraz folii typu „stretch”.

W trakcie przemieszczania urządzenia PelvicTutor w pomieszczeniach należy postępować w taki sposób, aby nie narażać jego krawędzi zewnętrznych na uderzenia i otarcia.

4. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!



Przy ustalaniu lub zmianie miejsca użytkowania należy zwrócić szczególną uwagę, aby w przestrzeni pod urządzeniem nie znajdowały się żadne przedmioty. Należy uniemożliwić niekontrolowany dostęp do urządzenia dzieciom, a także zwierzętom domowym (kot, pies itp.).

UWAGA!



Zabronione jest jakiegokolwiek modyfikowanie urządzenia bez pisemnego upoważnienia Producenta.

UWAGA!



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa

**UWAGA!**

Korzystanie z urządzenia PelvicTutor powinno odbywać się w ubraniu. Zaleca się stosować cienką, wygodną bieliznę, dres lub podobną część garderoby.

**UWAGA!**

Nie przekręcać i nie zginać rurki sensora.

**UWAGA!**

Przed przystąpieniem do treningu należy poinformować pacjenta o konieczności wypróżnienia się.

Podczas użytkowania urządzenia PelvicTutor należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. PelvicTutor obsługuje personel, który zapoznał się z instrukcją obsługi i posiada odpowiednią wiedzę fachową.
3. Przed rozpoczęciem treningu należy ocenić czy pacjent może rozpocząć ćwiczenia na urządzeniu (omdlenia itp.).
4. Urządzenia należy używać wyłącznie z jego przeznaczeniem.
5. Nie wolno zostawić pacjenta bez opieki w trakcie korzystania z urządzenia.
6. Przed każdym użyciem PelvicTutor należy upewnić się, że urządzenie nie posiada widocznych uszkodzeń.

5. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

5.1. Miejsce eksploatacji

Miejsce eksploatacji urządzenia należy wybrać tak, aby z każdej jego strony, pozostawała wolna przestrzeń minimum 800mm (rysunek 3).