

3.2 Kompletacja

Wózek pod aparaturę medyczną QUBIQ	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe	wg zamówienia

3.3 Transport i pakowanie

Transport urządzenia przebiega w kartonowym opakowaniu. Dopuszcza się ustawienie 9 szt. urządzenia (2 poziomy) na jednej paletce EURO (1200x800) obwiązując gotową paletę taśmą „stretch” oraz taśmami strap zgodnie z instrukcją pakowania. Nie dopuszcza się sztaplowania palet. Urządzenie jest zabezpieczone pianką poliuretanową oraz folią „stretch”.

3.4 Warunki transportu i przechowywania

Transport i składowanie urządzenia należy przeprowadzać w opakowaniu transportowym producenta. Warunki klimatyczne powinny zawierać się w przedziałach:

- temperatura otoczenia: $-10 \div 45^{\circ}\text{C}$ (zalecane 20°C lub mniej),
- wilgotność powietrza: $20 \div 95\%$ (chronić przed wodą),
- ciśnienie powietrza: $700 \div 1060$ hPa.

4 Ostrzeżenia ogólne i środki bezpieczeństwa



UWAGA!

Wózek zawsze należy parkować na płaskiej powierzchni i zablokować hamulce w kołach.



UWAGA!

Przed przemieszczaniem wózka należy upewnić się, że sprzęt znajdujący się na półkach został zabezpieczony przed przesuwaniem się, a przewód zasilający sprzęt został odłączony i umocowany w sposób bezpieczny na wózku.



UWAGA!

Podczas przemieszczania wózka należy zachować szczególną ostrożność.



UWAGA!

Maksymalny kąt pochylenia podłoża, po jakim może przemieszczać się wózek to kąt 5° .

5 Montaż akcesorium

5.1 Montaż nadstawki z uchwytem na dwie głowice

W celu zamontowania nadstawki (1) do wózka należy śruby zamkowe (3) umieścić w otworach w nadstawce (1). Następnie śruby włożyć w otwory (2). Nadstawkę przykręcić za pomocą nakrętek motylkowych (4).