

3.3. Transport i przechowywanie

Warunki otoczenia dla składowania transportu przedstawione zostały w tabeli 1. Transport wózka transportowo-kąpielowego Hydrogo do klienta odbywa się w kartonowym opakowaniu na palecie. Dopuszcza się sztaplowanie wózków do transportu, w co najwyżej 3 warstwach na specjalnie przygotowanych do tego celu paletach.

W trakcie przemieszczania wózka transportowo-kąpielowego Hydrogo w pomieszczeniach, należy działać w taki sposób, aby nie narażać jego krawędzi zewnętrznych na uderzenia i otarcia.

Warunki klimatyczne pomieszczenia powinny zawierać się w przedziałach:

- temperatura otoczenia: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$;
- wilgotność powietrza: $30 \div 75\%$;
- ciśnienie powietrza: $700 \div 1060\text{hPa}$.

4. OSTRZEŻENIA OGÓLNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Zabronione jest jakiegokolwiek modyfikowanie urządzenia bez pisemnego upoważnienia Producenta.



UWAGA!

Wyrób obsługuje personel, który zapoznał się z instrukcją obsługi i posiada odpowiednią wiedzę fachową.



UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, które nie naruszają podstawowych wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.



UWAGA!

Wózek transportowo-kąpielowy Hydrogo posiada ograniczoną zdolność obciążeniową. Masa pacjenta przy unoszeniu-opuszczaniu leża nie powinna przekraczać 200 kg, a maksymalne bezpieczne obciążenie robocze leża wózka prysznicowego podczas wykonywania kąpieli nie powinno przekraczać 275 kg.



UWAGA!

Aby uniknąć upadku podczas przenoszenia pacjenta, należy zablokować hamulce kół po obu stronach wózka.



UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z zasadami i przepisami określonymi w instrukcji obsługi) użytkowania wyrobu.



UWAGA!

Należy unikać mocnego nasłonecznienia.



UWAGA!

Dozwolone jest używanie wyrobu w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka. Warunki klimatyczne pomieszczenia powinny zawierać się w przedziałach:


- temperatura pomieszczenia: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$;
- wilgotność powietrza: $30 \div 75\%$;
- ciśnienie powietrza: $700 \div 1060\text{hPa}$.

Podczas użytkowania wózka transportowo-kąpielowego Hydrogo należy przede wszystkim przestrzegać poniższych punktów:

1. Wyróbu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Wyrób przeznaczony jest do transportu w obiektach zamkniętych.

2. Należy zachować bezpieczny odstęp od mechanizmów podczas działania wyrobu. Ruchome elementy stwarzają zagrożenie zgniecenia.
3. Przed korzystaniem z wyrobu należy przeczytać instrukcję obsługi w celu uniknięcia uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego działania lub innych zagrożeń. Instrukcja zawiera ważne i niezbędne informacje.
4. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń.
5. Konserwacja oraz naprawy powinny być wykonywane przez fabryczny lub autoryzowany serwis.
6. Przed użyciem Hydrogo należy ocenić, czy pacjent może korzystać z wyrobu.
7. Nie zostawiać dzieci samych przy wyrobie.
8. Nie wolno zostawiać pacjenta bez opieki w trakcie korzystania z wyrobu.

Miejsce eksploatacji wyrobu powinno być tak dobrane, aby po ustawieniu wyrobu z każdej jego strony było miejsce na ruch. Na rysunku 4 przedstawiono średnicę skrętu wyrobu.

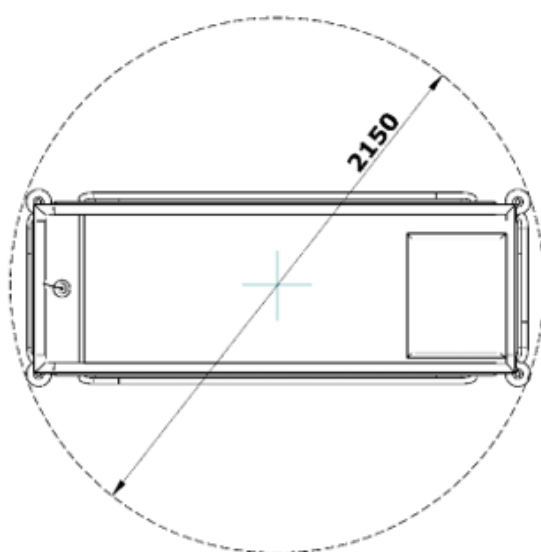

Rysunek 4 – Średnica skrętu wózka transportowo-kąpielowego Hydrogo (wymiar w mm)

5. OPIS FUNKCJI

5.1. Dźwignia do regulacji pracy kół jezdnych

UWAGA!



Należy zawsze korzystać z obydwu hamulców podczas korzystania z wyrobu.

Hamulce postojowe (rys.5) są ważnym elementem urządzenia. Zamontowane na wszystkich kołach jezdnych przeciwdziałają poruszaniu się urządzenia. W celu zablokowania kół jezdnych we wszystkich kierunkach, należy nacisnąć dźwignie z czerwoną kropką. Aby zwolnić koła, należy unieść dźwignie.