


> BLOK REPOZYCJONUJĄCY (CD.)

BLOK REPOZYCJONUJĄCY

Blok repozycjonujący może być umieszczony na platformie za pomocą otworów pozycjonujących pokazanych na zdjęciu poniżej:

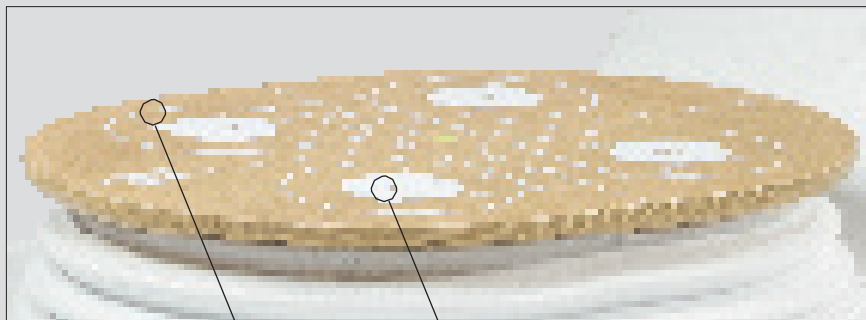

OTWORY POZYCJONUJĄCE

Aby ustawić blok repozycjonujący, wyrównać kolki pozycjonujące na bloku z otworami pozycjonującymi.



> WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje. **NIEBEZPIECZEŃSTWO - ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:**

- Upewnić się, że wyłączniki obwodu są wyłączone i upewnić się, że napięcie jest odcięte po jego użyciu i przed czyszczeniem.
- Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym.
- Wysoki prąd upływowy. przed podłączeniem do zasilania wymagane jest uziemienie. Urządzenie musi być podłączone do obwodów zasilania, które zasilają tylko to urządzenie. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami.

> INSTALACJA

PRZESTRZEŃ: należy zapewnić 1 metr wolnej przestrzeni wokół urządzenia, nie dopuszczając żadnych przedmiotów ani osób.



1 metr

> INSTALACJA (CD.)

Instalacja Państwa urządzenia HUBER 360® EVOLUTION musi być zgodna z instrukcjami podanymi w informacji na opakowaniu (znajdującej się w kieszonce przyklejonej do pudełka). HUBER 360® EVOLUTION jest urządzeniem niemobilnym i musi być podłączony przez autoryzowanego instalatora zgodnie z wszystkimi lokalnymi/krajowymi przepisami.

- Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną należy odłączyć prąd.
- Upewnić się, że w obwodzie przed urządzeniem zainstalowano urządzenie różnicowe (wykrywające składową stałą i zmienną z przetwornicy częstotliwości), które musi ściśle odpowiadać wszystkim odpowiednim przepisom bezpieczeństwa i ograniczeniom.
- Upewnić się, że wartość znamionowa wyłącznika jest zgodna z wartością znamionową HUBER 360® EVOLUTION (wyłącznik nadprądowy o krzywej typu C musi mieć wyższą wartość znamionową niż urządzenie). Umieścić ścienną skrzynkę przyłączeniową (z pokrywą izolacyjną) jak najbliżej głównego źródła zasilania elektrycznego w celu stałego podłączenia do HUBER 360® EVOLUTION. Nie podłączać za pomocą zwykłej, wyjmowanej wtyczki i gniazdka.
- Zlokalizować przewód neutralny instalacji elektrycznej, upewniając się, że napięcie na przewodzie neutralnym jest bliskie 0V.
- Zapewnić prawidłowe okablowanie fazy, uziemienia i neutralnego w HUBER 360® EVOLUTION.
- Po zakończeniu podłączania, ponownie podłączyć prąd elektryczny i uruchomić HUBER 360® EVOLUTION poprzez aktywację wyłącznika.
- Upewnić się, że HUBER 360® EVOLUTION jest włączony i działa prawidłowo.
- Urządzenie musi być podłączone do dedykowanej pojedynczej linii zasilającej.



PRZEWODY HUBER 360® EVOLUTION



POŁĄCZENIE STAŁE (HUBER 360® EVOLUTION)
I POŁĄCZENIE STANDARDOWE (ZABRONIONE)



INSTALACJA
ZAKOŃCZONA

> OSTRZEŻENIE

TO ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POPARZEŃ, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ CIAŁA:

- Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
- Należy wyłączyć urządzenie, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub przed instalacją lub demontażem części.
- Należy uważnie obserwować urządzenie, gdy jest ono używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne, na nich lub w ich pobliżu.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub gniazdo są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub jeśli było narażone na nadmierną wilgotność.
- Zwróć urządzenie do centrum serwisowego LPG Systems w celu sprawdzenia i naprawy.
- Nie wolno używać urządzenia z zatkanyimi otworami wentylacyjnymi. Otwory wentylacyjne powinny być wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń.
- Nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używać urządzenia na brudnej lub nierównej podłodze, w wilgotnym i nie wystawiać go na działanie złych warunków atmosferycznych.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu aerozoli (rozpylaczy) lub produktów tlenowych.
- Nigdy nie dotykać jednocześnie pacjenta i niezabezpieczonych kabli połączeniowych.

≡ OSTRZEŻENIE

Informacje o dostarczonego przewodzie zasilającym:
Europa H05VVF3G1,50

Japonia VCTF3×2,00

USA, Kanada, Meksyk SJT3×14AWG1,5

> ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE : ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

- Jak w przypadku każdego treningu fizycznego, przed użyciem urządzenia należy przeprowadzić badanie lekarskie.
- Specjalista powinien upewnić się, że ustawienia (prędkość oscylacji platformy, amplituda, czas trwania aktywności/odpoczynku, itp.) są prawidłowe dla morfologii i kondycji fizycznej użytkownika.
- Urządzenie powinno być używane pod starannym nadzorem przeszkolonego specjalisty.
- Użytkownicy powinni się odpowiednio rozgrzać przed użyciem sprzętu do ćwiczeń.
- Użytkownicy powinni regularnie oddychać podczas ćwiczeń.
- Nie zaleca się używania tego sprzętu z maksymalnym wysiłkiem, gdy platforma jest w ruchu.
- Użytkownik powinien natychmiast przerwać ćwiczenia, jeśli odczuwa jakikolwiek dyskomfort.
- Nie należy używać urządzenia w nieodpowiednich warunkach otoczenia (specyfikacja techniczna).
- Podczas korzystania ze stołka przegubowego stopy użytkownika powinny spoczywać na platformie, a nie na podstawie stołka przegubowego.
- Jak sama nazwa wskazuje, przycisk zatrzymania awaryjnego powinien być używany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.
- Tableć może być używany wyłącznie przez przeszkolonego specjalistę znajdującego się w pobliżu maszyny.
- Ten symbol oznacza "Wysokie napięcie": 

> OSTRZEŻENIA

- Z urządzeń nie powinny korzystać osoby z chorobami serca, układu oddechowego, neurologicznymi lub reumatycznymi, które nie pozwalają na aktywność fizyczną.
- W przypadku powrotu do formy, aktywności podtrzymującej i profilaktycznej, pacjent powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia aktywności fizycznej.
- Ze względu na ryzyko ewentualnych zakłóceń, ważne jest, aby specjalista upewnił się, że pacjent nie jest wyposażony w urządzenia, takie jak rozrusznik serca.
- W takim przypadku należy ustalić, czy sprzęt ten nie emituje sygnału, który może zakłócać funkcjonowanie urządzenia.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby z chorobą, chyba że przez cały czas będzie im towarzyszył wykwalifikowany specjalista posiadający certyfikat zgodny z normami obowiązującymi w kraju użytkowania.
- W przypadku terapii, ocena diagnostyczna przeprowadzona przed użyciem urządzenia przewiduje następujące wskazania i przeciwwskazania:
 - Zapalenie stawów
 - Ostry reumatyzm
 - Niedawny uraz
 - Zakażenie układu mięśniowo-szkieletowego
 - gorączka
 - Zakrzepica żylna
 - Ostra dyskopatia
 - Problemy neuropsychologiczne, które uniemożliwiają zrozumienie instrukcji lub inne poważne problemy psychologiczne
 - Choroba sercowo-naczyniowa lub jakikolwiek postępujący lub przewlekły stan, który stanowi przeciwwskazanie do ćwiczeń
- Poważne zniekształcenia anatomiczne

⚠ OSTRZEŻENIE

O każdym poważnym zdarzeniu związanym z urządzeniem HUBER 360® EVOLUTION należy powiadomić lokalnego dystrybutora LPG oraz właściwe władze.

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie zawiera programy, które mają za zadanie prowadzić użytkownika w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów, jakich można się spodziewać w jego przypadku. Nie gwarantuje to w żaden sposób, że terapia zakończy się sukcesem. Sukces zależy od stanu zdrowia, morfologii i fizjologii każdego użytkownika. Modyfikowanie urządzenia bez autoryzacji LPG jest surowo zabronione.

> KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybilności elektromagnetycznej, patrz "Kompatybilność elektromagnetyczna" w załączniku.

> CLEANING THE DEVICE

Urządzenie należy czyścić jak najczęściej, nie tylko ze względów higienicznych i estetycznych, ale również dlatego, że czyszczenie pomaga utrzymać je w dobrym stanie i przedłużyć jego żywotność:

- Do czyszczenia zewnętrznej strony wszystkich pokryw należy używać wilgotnej gąbki.
- Do czyszczenia uchwytów używaj chusteczek nasączonych roztworem bakteriobójczym i grzybobójczym.
- Użyć odkurzacza z wąską przystawką do czyszczenia platformy i wnętrza otworów pozycjonujących.
- W przypadku problemów technicznych należy zapoznać się z rozdziałem 5 "Rozwiązywanie problemów"

> TABLICZKA ZNAMIONOWA



NAPIĘCIE
I CZĘSTOTLIWOŚĆ

NUMER SERYJNY



NAPIĘCIE
I CZĘSTOTLIWOŚĆ

NUMER SERYJNY

≥ OSTRZEŻENIE

— Tabliczka identyfikacyjna może zostać zmodyfikowana. Tabliczka znamionowa znajdująca się na urządzeniu jest zatwierdzoną tabliczką znamionową.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general note-taking. There are no margins, text, or other markings on the page.