

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w tej instrukcji.

Niebezpieczeństwo

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do czyszczenia i/lub prac serwisowych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenie

- Nie modyfikować tego urządzenia bez zgody producenta.
- Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób, należy zainstalować urządzenie 7.0T na płaskiej, równej powierzchni z dostępem do 10-amperowego uziemionego gniazdka 230 V AC, 50 Hz. Nie należy używać przedłużacza, chyba że jest to kabel 12awg lub większy, z jednym gniazdem na końcu. Urządzenie 7.0T powinno być jedynym urządzeniem w obwodzie elektrycznym. Nie należy próbować wyłączać wtyczki z uziemieniem za pomocą niewłaściwych adapterów ani w żaden sposób modyfikować zestawu przewodów; może to spowodować poważne zagrożenie porażeniem prądem lub pożarem, a także nieprawidłowe działanie komputera.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie to należy podłączyć wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym.
- Urządzenie 7.0T należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie 7.0T należy trzymać z dala od dzieci. W urządzeniu znajdują się ruchome części, oczywiste miejsca uszczypnięcia i inne obszary zagrożenia, które mogą spowodować obrażenia.
- Z wyjątkiem instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia 7.0T, należy trzymać ręce z dala od wszystkich ruchomych części.
- Przewód elektryczny należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni i poza pasami ruchu, a w przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki nie wolno używać urządzenia 7.0T.
- Nigdy nie upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów do żadnych otworów.

- Nie używać na zewnątrz.
- Aby odłączyć urządzenie, należy ustawić wszystkie elementy sterujące w pozycji wyłączonej, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie 7.0T zostało zaprojektowane do użytku komercyjnego i spełnia wymagania programów ortopedycznych, sportowych i ogólnych programów kondycyjnych.
- Nie należy próbować używać urządzenia 7.0T do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
- Czujniki pulsu nie są urządzeniami medycznymi. Różne czynniki, w tym ruch użytkownika, mogą wpływać na dokładność odczytów tętna. Czujniki pulsu są przeznaczone wyłącznie jako pomoc do ćwiczeń w określaniu ogólnych trendów tętna.
- System monitorowania tętna może być niedokładny. Nadmierne ćwiczenie może spowodować obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia.
- Należy zapewnić minimalną przestrzeń po bokach urządzenia 7.0T wynoszącą dwie stopy, aby zapewnić prawidłowe działanie, łatwy dostęp i zapobiec ewentualnym obrażeniom osób stojących lub chodzących w pobliżu. Z przodu powinna być co najmniej jedna stopa wolnej przestrzeni, a z tyłu trzy i pół stopy.
- Nie należy stosować w tym modelu 7.0T żadnych części pochodzących z rynku wtórnego, innych niż zalecane przez Dyaco.
- Nie należy podejmować prób serwisowania lub regulacji innych niż opisane w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne czynności należy pozostawić przeszkolonemu personelowi serwisowemu zaznajomionemu z urządzeniami elektromechanicznymi i upoważnionemu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju do przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych.
- Instalacja i montaż tego produktu powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Podczas wchodzenia i schodzenia z 7.0T należy trzymać się uchwytów w celu uzyskania podparcia.
- Aby uniknąć obrażeń, należy przestrzegać wszystkich minimalnych i maksymalnych ustawień regulacji.
- Noś odpowiednie obuwie. Wysokie obcasy, buty wizytowe, sandały lub gołe stopy nie nadają się do użytku na urządzeniu 7.0T. Zalecane jest wysokiej jakości obuwie sportowe, aby uniknąć zmęczenia nóg.
- Linka bezpieczeństwa jest dostarczana z tym 7.0T. Jest to prosta konstrukcja magnetyczna, która powinna być używana przez cały czas. Służy ona do zapewnienia bezpieczeństwa w razie upadku lub zbytniego cofnięcia się na pasie bieżni. Pociągnięcie za linkę bezpieczeństwa zatrzyma ruch pasa bieżni.