

V.10. Bezpieczeństwo zabiegów

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem zabiegu konieczne jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, pozwalającego na ustalenie, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegu.

OSTRZEŻENIE: W przypadku nietypowego funkcjonowania aparatu, które może stwarzać zagrożenie dla pacjenta lub obsługi, należy natychmiast przerwać zabieg i postępować dalej jak w rozdziale VI. Konserwacja.

OSTRZEŻENIE: W celu zapobiegania przeniesieniu szkodliwych drobnoustrojów na innych pacjentów lub obsługę, należy zwracać uwagę na higienę pacjentów i obsługi oraz pamiętać o stosowaniu jednorazowych podkładów pod elektrody (np. z gazy wyjałowionej) lub o właściwej dezynfekcji podkładów po każdym zabiegu.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli u pacjenta występuje zmniejszenie wrażliwości czucia (przy zaburzeniach czucia) **nie wolno** ustawiać natężenia prądu na jego odczucie. W przeciwnym razie pacjent jest narażony na konsekwencje zastosowania nadmiernego natężenia prądu, włącznie z poparzeniem. **(Szczególnie duża ostrożność przy zabiegu jonoforezy).**

OSTRZEŻENIE: Nie wolno wykonywać zabiegów samą elektrodą bez podkładu, ponieważ może to spowodować oparzenia pacjenta.

OSTRZEŻENIE: Elektrody wolno przykładać wyłącznie na odpowiednio nawilżony podkład i tylko na zdrową skórę z nieuszkodzonym naskórkiem.

OSTRZEŻENIE: Elektrody należy układać kiedy aparat jest aktywny (włączony jest przycisk zasilania – POWER w pozycji I). W przeciwnym wypadku (przy wyłączonym aparacie) przy uruchamianiu aparatu pacjent może zostać nieprzyjemnie porażony.

OSTRZEŻENIE: Nie włączać ani nie wyłączać urządzenia (przyciskiem POWER) kiedy aktywne elektrody są podłączone do pacjenta. Może to skutkować chwilowymi nieprzyjemnymi odczuciami.

WAŻNE: Należy pamiętać o tym, że stosowanie podkładu pod elektrody jest konieczne dla właściwego przepływu prądu. Dlatego należy dbać o właściwą wilgotność i grubość podkładu.

WAŻNE: Przed zabiegiem należy sprawdzić czy pacjent nie stosował maści na miejscach przyłożenia elektrod i ewentualnie oczyścić skórę (maść może wpływać na niewłaściwe przewodzenie prądu). Podobnie w wypadku nadmiernego owłosienia – należy ogolić miejsce przykładania elektrod (gęsta warstwa włosów utrudnia przewodzenie prądu).

UWAGA: anoda (+) jest podłączona do czerwonej końcówki kabla, katoda (–) jest podłączona do czarnej końcówki kabla

V.11. Zalecana organizacja miejsca pracy

Aparat powinien być ustawiany stabilnie w pobliżu miejsca wykonywania zabiegu.

Zalecane jest, aby organizacja miejsca pracy umożliwiała swobodny dostęp do aparatu i wszelkich akcesoriów. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na takie umieszczenie przewodów zasilających i połączeniowych, aby nie mogły zostać przypadkowo zerwane i nie utrudniały poruszania po pomieszczeniu. Należy tak dobrać miejsce do odkładania przewodów, żeby nie wisiały zbyt blisko szuflad lub drzwi szafek, aby nie przyciąć i nie uszkodzić ich przypadkowo.