



- Skręć pokrętła ① mocną za pomocą rąk.

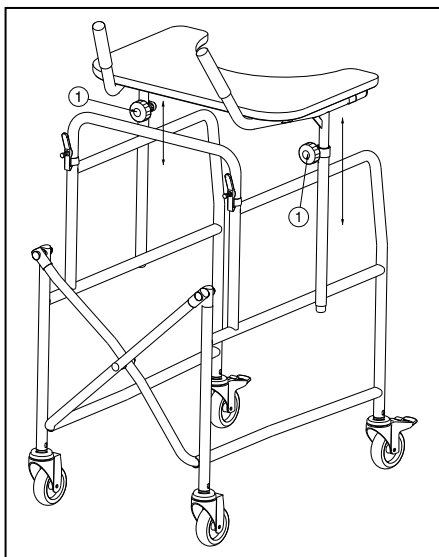

9. Hamulec


- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Na prawidłową pracę hamulców wpływ ma zużycie oraz zanieczyszczenie ogumienia (woda, olej, błoto, ...) – należy sprawdzać stan ogumienia przed każdym.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Hamulce są mogą ulec zużyciu – należy sprawdzać stan hamulców przed każdym użyciem.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Ryzyko niezamierzonego ruchu – przed zwolnieniem hamulców należy upewnić się, że 4-kołowy balkonik znajduje się na płaskiej, poziomej powierzchni.

4-kołowe balkoniki są wyposażone w dwa koła tylne koła które posiadają hamulce postojowe.

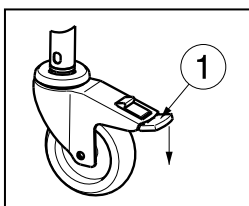

Włączanie hamulca postojowego

Naciśnij stopą płytę hamulca ① znajdującą się pośrodku, aż zablokuje się w odpowiedniej pozycji.

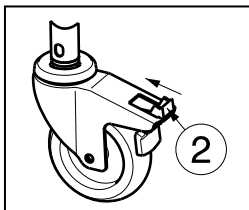

Zwalnianie hamulca postojowego

Naciśnij stopą płytę hamulca ② a następnie przesunij nogą zabezpieczenie do przodu.

10. Instrukcje bezpieczeństwa

- Należy się upewnić, że podczas używania 4-kołowego balkonika nic nie blokuje kół (kamień lub inna przeszkoda).

- Należy się upewnić, że hamulce są zawsze w trybie parkingowym przed używaniem 4-kołowego balkonika. Kiedy użytkownik jest pewny, że jego wyprostowana postawa jest stabilna i pewna można odblokować hamulce.
- Przed użyciem upewnij się, że przyciski blokujące wysokość stolika są zablokowane.
- Należy sprawdzić, czy blokada służąca składania i rozkładania balkonik działa poprawnie.
- Posługiwanie się 4-kołowym balkonikiem do chodzenia jest dozwolone tylko wtedy kiedy użytkownik czuje się stabilnie i komfortowo oraz gdy jego dwie dłonie spoczywają na stoliku i zapewniają mu oparcie.
- Nie należy chwytać uchwyty wilgotnymi dłońmi. Ręce mogą się ześliznąć z uchwytów i w ten sposób użytkownik może utracić równowagę.
- **Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika to 120 kg.** 4-kołowy balkonik może być używany tylko na równej powierzchni.
- Nie należy używać 4-kołowego balkonika na schodach lub na nierównej nawierzchni maksymalna wysokość nierówności 40 mm.
- Należy unikać bardzo stromych zjazdów w dół.
- Nie należy używać 4-kołowego balkonika do przewożenia towarów oraz różnych rzecz.
- Ryzyko urazu – Powierzchnie mogą przyjmować temperaturę otoczenia.
- Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i serwisu. Producent nie bierze odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane przez nie właściwe użytkowanie i konserwację.

11. Pielęgnacja

Do mycia należy używać tylko mydła. Płyn do czyszczenia nie powinien mieć PH na poziomie przekraczającym 6. Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik. Należy zawsze zwrócić uwagę na instrukcję środka czyszczącego. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki oraz letniego płynu. Unikać przemoczenia. Nie należy używać metalowych szczotek oraz żadnych innych ostrych przyborów czyszczących. W przypadku uszkodzenia lakieru lub stolarki, skonsultuj się ze sprzedawcą. Regularna pielęgnacja 4-kołowego balkonika pozwala utrzymać je w idealnym stanie.

12. Dezynfekcja

Do sterylizacji należy stosować wyłącznie środki odkażające przeznaczone do powlekanych powierzchni metalowych i powierzchni drewno. Należy zawsze zwrócić uwagę na instrukcję środka czyszczącego.