

- Stolik nie jest przeznaczony do przewozu osób lub dóbr.
- Gwarancja na produkt jest udzielona przy założeniu normalnego użytkowania i konserwacji, opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową eksploatacją lub brakiem konserwacji spowoduje unieważnienie gwarancji.

3.3 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


PRZESTROGA

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzenia

- Nie stawaj na rurach dolnej ramy, gdyż może to doprowadzić do wywrócenia się stołu.
- Nie opieraj się o blat stołu
- Nie podnoś stołu ciągnąc za blat
- Nie należy umieszczać na blatach żadnych przedmiotów większych od nich.
- Nie należy przekraczać nośności blatów.
- Nie korzystaj ze stołu do transport osób lub obiektów.
- Naprawy stołu mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowanego dostawcę.
- Przestrzegaj instrukcji konserwacji i serwisu. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieprawidłowe serwisowanie/ konserwację.

3.4 Wysyłka i przechowywanie

Transport i przechowywanie stolika powinno się odbywać zgodnie z parametrami technicznymi w §7. Upewnij się, że stolik jest przechowywany w suchym środowisku.

Należy zapewnić dostateczną osłonę lub opakowanie, chroniące stół przed korozją i ciałami obcymi (np. wodą morską, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem).

Należy zadbać o to, aby nad stołem lub obok niego nie znajdowały się żadne przedmioty, które mogłyby go uszkodzić.

4 Montaż i regulacje

4.1 Montaż

1. Ustawić dolną ramę na 4 kółkach.
2. Włożyć rurki ramy górnej do odpowiednich gniazd ramy dolnej i zabezpieczyć je na żądanej wysokości za pomocą nakrętek

motylkowych (minimalna głębokość włożenia: 80 mm).

4.2 Regulacja


PRZESTROGA

Ryzyko obrażeń

- Regulacja tacy ma wpływ na stabilność produktu (niebezpieczeństwo przewrócenia).
- Blat powinien być przechylany jedynie do poziomu gdzie nic z niego nie spadnie.

4.2.1 Regulacja wysokości

1. Poluzować nakrętki skrzydełkowe na dolnej ramie.
2. Wyregulować wysokość, pociągając górną ramę w górę/dół.
3. Ponownie dokręcić nakrętki motylkowe.

4.2.2 Regulacja pochyleń i długości

1. Poluzować dźwignię znajdującą się pod tacą.
2. Wsuń tacę poziomo lub wyreguluj kąt.
3. Ponownie dokręć dźwignię.


5 Użytkowanie

5.1 Korzystanie z hamulców


PRZESTROGA

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzenia

Hamulce mogą się zużyć. Sprawdź funkcjonowanie hamulców przed każdym użyciem.

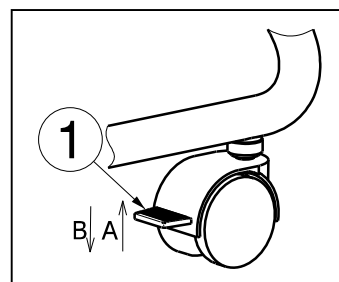

5.1.1 Blokowanie hamulców [B]

1. Za pomocą stopy dociśnij płytę hamulca, aż zablokuje się na miejscu.
2. Powtórz dla wszystkich kół. Koła nie mogą się teraz ani toczyć ani obracać.

5.1.2 Zwolnienie hamulca [A]

1. Za pomocą stopy podnieść płytkę hamulca do góry.
2. Powtórz dla wszystkich kół. Koła zostały odblokowane i mogą się teraz zarówno obracać jak i toczyć.