

4. Maksymalne obciążenie / waga pacjenta

System zmiennociśnieniowy novacare® ASX zaprojektowano dla pacjentów ważących maksymalnie 140 kg. W przypadku pacjentów o większej masie ciała należy stosować systemy zmiennociśnieniowe novacare® serii APM.

5. Materiał opakowania

Po dostarczeniu należy sprawdzić produkt i opakowanie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli system ma być transportowany po użyciu, należy użyć oryginalnego opakowania. Nieużywane opakowanie należy zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

6. Środki bezpieczeństwa przed użyciem

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia z powodu nieprawidłowej obsługi lub zagrożeń dla pacjenta i użytkownika, przed użyciem należy w całości przeczytać instrukcję obsługi. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Używać systemu i wyposażenia dodatkowego wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi przechowywać starannie, w sposób umożliwiający stały dostęp użytkowników. W przypadku zmiany właściciela do produktu należy dołączyć instrukcję.

Firma novacare® gmbh nie odpowiada za użytkowanie systemu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

- Wszystkie części należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i nie wolno ich zmieniać lub modyfikować.
- Ustawień może dokonywać wyłącznie przeszkolony personel pielęgniarstwa lub inne przeszkolone osoby dorosłe.
- Należy zwracać uwagę na zmiany skórne. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.
- Zasadniczo należy przestrzegać przepisów ustawy o wyrobach medycznych i rozporządzenia w sprawie użytkowania wyrobów medycznych.

7. Bezpieczeństwo / przygotowanie systemu do użycia

1. Wyjąć sterownik z kartonu, rozłożyć uchwyt znajdujący się z tyłu urządzenia i zamocować je w nogach łóżka.
2. Następnie wyjąć z kartonu nakładkę materacową i nałożyć ją na materac znajdujący się na łóżku pacjenta (zwrócić uwagę na dopasowanie rozmiaru nakładki do materaca). Jeśli osiągnięcie minimalnego odstępu nie jest możliwe, należy użyć nadstawki do barierki bocznych.
3. Uważać, żeby przewód przyłączeniowy znajdował się w nogach łóżka i nie był wygięty.

4. Opcja: Można zastosować również nakładkę materacową ze zintegrowaną bazą materaca (opcjonalne wyposażenie dodatkowe: art. nr 991508+). W tym celu wsunąć bazę materaca do przekładki znajdującej się pod komorami i zamknąć pokrowiec całościowy. z materaca do łóżka pacjenta.
5. Zamocować do stelaża łóżka kompletny materac za pomocą pasów mocujących. Pasy znajdują się na spodzie materaca.
6. Miejsce na stopy oznaczono nadrukiem stóp na pokrowcu materaca. W miejscu na głowę znajduje się zawór reanimacyjny CPR.
7. Podłączyć adapter przyłączeniowy głównego przewodu zasilającego materaca (uprzednio zdjąć zabezpieczenie transportowe) do gniazda przyłączeniowego sterownika. Zwrócić uwagę na prawidłowe wsunięcie wtyczki (patrz punkt 12).
8. Sprawdzić ustawienie przełącznika zaworu reanimacyjnego CPR. Przełącznik musi być ustawiony w pozycji „close”.
9. Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazdka elektrycznego (230 V), zwracając uwagę na odpowiednie napięcie sieciowe.
10. Włączyć sterownik, przytrzymując przycisk Power (2 sek.).
11. Następnie naciskając przycisk trybu, ustawić urządzenie zgodnie z wybranym trybem pracy na tryb nacisku zmiennego (świeci się wskaźnik LED „ALTER”) lub tryb statyczny (świeci się wskaźnik LED „STATIC”).
12. Proces pompowania trwa ok. 40-45 minut.
13. System jest gotowy do użycia, gdy zgaśnie wskaźnik „LOW”.
14. Ustawić regulator na wagę pacjenta. Orientować się przy tym według masy wskazanej na panelu sterowniczym.
15. Pacjenta można ułożyć na materacu. Aby poprawić komfort leżenia pacjenta, na system można położyć prześcieradło. Zwracać uwagę na ewentualne tworzenie się zagięć.
16. Przeprowadzić Test praktyczny (patrz punkt 13) i w razie potrzeby skorygować indywidualnie (uwzględniając funkcję blokowania przycisków).

Ważne:

System zmiennociśnieniowy można stosować również w łóżkach regulowanych. Przy podwyższeniu łóżka w wezgłowie należy zwiększyć ustawione ciśnienie materaca o 1-2 stopnie. Jeśli to możliwe unikać przestawiania łóżka o więcej niż 30°. Przeprowadzić „test praktyczny” (patrz punkt 13).

Komory w wezgłowie są statyczne, nie alternacyjne. Ustawienie wybrane dla ciśnienia zmiennego wpływa na ciśnienie w komorach wezgłowia.