



Montaż /
demontaż pasa
bezpieczeństwa:
• Poluzuj pokrętkę
w celu
wyjęcia pasa
bezpieczeństwa.

10. Hamulec


L OSTRZEŻENIE: Na prawidłową pracę hamulców wpływ ma zużycie oraz zanieczyszczenie ogumienia (woda, olej, błoto, ...) – należy sprawdzać stan ogumienia za każdym razem

L OSTRZEŻENIE: Hamulce mogą ulec zużyciu – należy sprawdzać stan hamulców przed każdym użyciem.

Balkonik został wyposażony w wielofunkcyjny hamulec. Uchwyt hamulca pod rączką do pchania może pracować jako hamulec standardowy jak również jako hamulec parkingowy.

Aby używać hamulca jako standardowego należy uchwyt hamulca zaciągać do góry.

Aby używać hamulca jako parkingowego należy uchwyt hamulca odepchnąć w dół do momentu, aż usłyszysz się charakterystyczny dźwięk włączenia hamulca. Koła w tym momencie są zablokowane, aby je odblokować należy pociągnąć ponownie uchwyt hamulca do góry (należy używać obydwu hamulców parkingowych na raz).

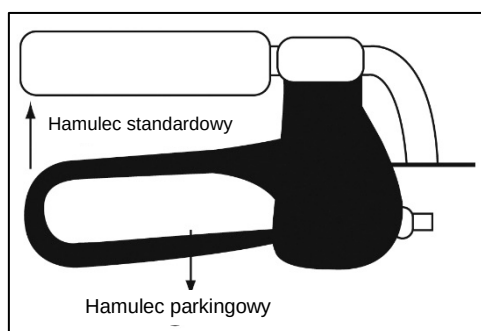

11. Koszyk

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko upadku- Nie należy przeładowywać koszyka na zakupy.

Maksymalne obciążenie podczas używania chodzika - 5 kg.

12. Instrukcja bezpieczeństwa

- Należy się upewnić, że podczas używania chodzika nic nie blokuje kół (kamień lub inna przeszkoda).
- Należy się upewnić, że hamulce są zawsze w trybie parkingowym przed używaniem rolatora. Kiedy użytkownik jest pewny, że jego wyprostowana postawa jest stabilna i pewna można odblokować hamulce.
- Istnieje ryzyko poparzenia - Należy zachować ostrożność podczas przewożenia przy bardzo wysokich i niskich temperaturach (na ostrym słońcu, mrozie, w saunie itp.) przez dłuższy czas i przy kontakcie ze skórą.
- Przed używaniem należy upewnić się, że uchwyty są dokładnie dociśnięte.
- Należy sprawdzić, czy blokada służąca składania i rozkładania balkonik działa poprawnie.
- Posługiwanie się rolatora do chodzenia jest dozwolone tylko wtedy kiedy użytkownik czuje się stabilnie i komfortowo oraz dwie ręce spoczywają na rączkach uchwytu.
- Nie należy chwytać rączek do uchwytu wilgotnymi dłońmi. Ręce mogą się ześlizgnąć z uchwytów i w ten sposób użytkownik może utracić równowagę.
- Jeśli podczas używania rolatora użytkownik poczuje się zmęczony, należy zablokować hamulce i usiąść na półce.
- Maksymalna dopuszczana waga użytkownika to 130 kg** i rolator może być używany tylko na równej powierzchni. Nie należy używać chodzika na schodach lub na nierównej nawierzchni maksymalna wysokość nierówności 40 mm.
- Podczas używania rolatora na zewnątrz, staraj się aby powierzchnia była równa i stabilna. Należy unikać krawężników i głębokich dziur. Szukaj miejsc z łagodnymi zjazdami, niskimi krawężnikami.
- Nie należy używać chodzika w ruchu ulicznym tylko na chodniku. Używaj tylko na chodniku.
- Należy unikać ścieżek wyboistych i piaszczystych. Grozi utratą kontroli nad chodzikiem i stabilności.
- Należy unikać ścieżek bardzo stromych.
- Nie należy używać rolatora do przewożenia osób lub innych rzeczy.
- Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i serwisu. Producent nie bierze

odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie i konserwację.

13. Pielęgnacja

Zaleca się do czyszczenia używanie roztworu wody z mydłem. Płyn do czyszczenia nie powinien mieć PH na poziomie przekraczającym 6. Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik. Należy zawsze zwrócić uwagę na instrukcję środka czyszczącego. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki oraz letniego płynu. Unikać przemoczenia. Nie należy używać metalowych szczotek oraz żadnych innych ostrych przyborów czyszczących. W przypadku uszkodzenia lakieru lub tworzyw, skonsultuj się ze sprzedawcą. Regularna pielęgnacja rolatora pozwala utrzymać je w idealnym stanie.

14. Dezynfekcja

Do sterylizacji należy stosować wyłącznie środki odkażające przeznaczone do powlekanych powierzchni metalowych i powierzchni plastikowych. Należy zawsze zwrócić uwagę na instrukcję środka czyszczącego. Zaleca się stosować środki sprawdzone które są na liście Instytutu Roberta Kocha (informacje można uzyskać na stronie: www.rki.de). Dezynfekcja może być przeprowadzona wyłącznie przez przeszkolone osoby. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.

15. Naprawy/konserwacja/ przegląd

Na żywotność balkonika ma wpływ sposób używania, sposób przechowywania, dokonywanie regularnych oględzin, utrzymanie w czystości.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Naprawy i remonty powinny być przeprowadzone wyłącznie przez przeszkolone osoby. Jeśli to możliwe należy korzystać z serwisu dostawcy. On chętnie pomoże w odniesieniu do usług i remontów.

Przed każdym używaniem chodzik powinien być sprawdzony pod względem:

- Kompletności
- Prawidłowego działania mechanizmu składania.
- Funkcjonowania kółek (stabilność, właściwości jezdne, mocowanie śrub)
- Ramy (uszkodzenia, deformacje, stabilność)

- Kondycji rączek do uchwytu (bezpiecznego blokowania regulacji wysokości, prawidłowego podparcia)
- Hamulce
- Kondycji takich elementów jak: siedzisko, oparcie, koszyk.
- Czyszczenie
- **Uszkodzenia powłoki lakierniczej (usunąć możliwą rdzę i przemałować)**

Co 8 tygodni:

- Smarowanie (ruchome części powinny być smarowane)

Co 6 miesięcy lub przed każdym nowym użytkownikiem, kula powinna być poddana:

- Przeglądowi generalnemu
- Dezynfekcji

16. Wysyłka i Przechowywanie

Podczas transportu i przechowywania chodzika należy się stosować do następujących instrukcji:

- Fotel inwalidzki transportowy powinien być przechowywany wyłącznie w suchych pomieszczeniach (od + 5 °C do + 41 °C).
- Względna wilgotność powietrza: 30–70%.
- Zapewnić odpowiednie przykrycie lub opakowanie chroniące rolatora przed rdzą i ciałami obcymi (np. słoną wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem).
- Przechowywane elementy muszą być wolne od nacisku (nie umieszczać ciężkich części na chodzik, nie wciskać pomiędzy inne obiekty ...).

17. Gwarancja

Wycinek z „Ogólnych warunków prowadzenia działalności”:

(...)

5. Okres gwarancji obejmujący roszczenia gwarancyjne trwa 24 miesiące.

(...)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek dokonywania zmian strukturalnych produktu, niewystarczającej konserwacji, niewłaściwego użytkowania lub przechowywania lub korzystania z nieoryginalnych części.

Gwarancja nie obejmuje również części lub części ruchomych podlegających naturalnemu zużyciu.

18. Utylizacja

Podczas utylizacji balkonika należy się skontaktować z lokalnym centrum składowania odpadów lub zwrócić produkt wyspecjalizowanemu sprzedawcy, który po poddaniu wózka procedurze czyszczącej może odesłać go do producenta, który z kolei