


Uchwyty łazienkowe Izzie

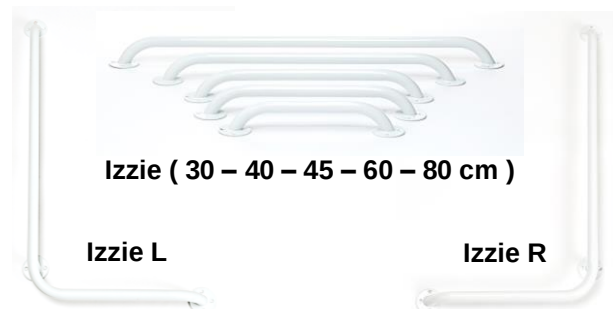

1 Przy dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. W zestawie powinny znajdować się:

- 1 uchwyt łazienkowy
- 6 wkrętów montażowych (8 dla Izzie R/L)
- 6 kołków montażowych (8 dla Izzie R/L)
- 2 podkładki gumowe (3 dla Izzie R/L)
- Instrukcja obsługi

Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie skontaktować się z firmą transportową.

2 Mocowanie uchwyty łazienkowego


PRZESTROGA


Ryzyko obrażeń

- Sprawdź czy uchwyt łazienkowy jest zamontowany poprawnie do ściany. Regularnie sprawdzaj mocowanie.
- Upewnij się, że w miejscu montażu nie ma żadnych przewodów elektrycznych ani rur.
- Kołki dostarczone wraz z produktem nadają się do ścian betonowych lub wykonanych z pełnej cegły. Dla innych typów ściany użyj odpowiedniego typu materiałów.

Zaprojektowane są jako elementy wsparcia. Mogą być stosowane wszędzie, również w otoczeniu wilgotnym. Należy korzystać z materiałów instalacyjnych, które są dostarczane w komplecie z uchwytem Izzie

Aby zainstalować Izzie:

1. Umieścić uchwyt łazienkowej w pożądanej pozycji.
2. Zaznaczyć na ścianie punkty mocowania.
3. Wywierć otwory w ścianie.
4. Zamontuj kołki.
5. Zamocuj gumowe uszczelki.
6. Przyłóż uchwyt łazienkowy do ściany.
7. Umieścić śruby i mocno dokręcić.

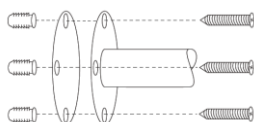

Należy korzystać z materiałów instalacyjnych, które są dostarczane w komplecie z uchwytem Izzie.

3 Korzystanie z uchwyty łazienkowego


PRZESTROGA

Ryzyko obrażeń, poparzenia

- Należy zachować ostrożność podczas dotykaniu w bardzo wysokich i niskich temperaturach (na ostrym słońcu, mrozie, w saunie itp.)
- W przypadku wystąpienia wad, należy powstrzymać się przed używaniem uchwyty.

Maksymalne obciążenie dla uchwyty łazienkowego wynosi 130 kg.

4 Konserwacja

Uchwyty Izzie można czyścić i dezynfekować za pomocą zwykłych domowych środków czyszczących. Należy unikać stosowania żrących substancji, które mogą powodować przebarwienia.

Wysoka jakość warstwy wierzchniej zapewnia optymalną ochronę przed korozją. W przypadku uszkodzenia warstwy wierzchniej poprzez zadrapanie lub w inny sposób należy zlecić wyspecjalizowanemu sprzedawcy naprawę powierzchni.

4.1 Przewidziany czas życia

Uchwyt łazienkowy został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu go przez średnio 5 lat.

5 Informacje techniczne

Producent	Vermeiren
Typ	Uchwyty łazienkowe
Model	Izzie
Opis	Wymiary
Maksymalne obciążenie	130 kg
Dystans uchwyt-ściana	40 mm
Minimalna powierzchnia montażu	30 cm: 65 x 370 mm 40 cm: 65 x 470 mm 45 cm: 65 x 520 mm 60 cm: 65 x 670 mm 80 cm: 65 x 870 mm Izzie R/L : 480 x 880 mm
Temperatura przechowywania	+5°C - +41°C
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Tolerancja pomiarów +/- 15mm / 1,5kg / 1,5°.	