

Ławeczka prysznicowa Kate

1 Przy dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. W zestawie powinny znajdować się:

- 2 pudełka z śrubami i podkładkami
- 8 metalowych części ramy
- 4 plastikowych części ramy
- Instrukcja obsługi + instrukcja montażu

Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie skontaktować się z firmą transportową.

2 Montaż ławeczki prysznicowej

**PRZESTROGA**

Ryzyko obrażeń

- Przed użyciem ławeczki prysznicowej upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

Aby zamontować Kate:

1. Ustaw 4 nogi na tej samej wysokości korzystając z przycisku.
2. Zamontuj mocowanie uchwyty na swoim miejscu.
3. Zamontuj element łączące zgodnie z oznaczeniami na etykietach (strona 1, strona 2).
4. Zamontuj 3 płyty siedziska.
5. Korzystając z przycisków zamontuj uchwyt.
6. Złóż oparcie.
7. Korzystając z przycisków zamontuj oparcie.

Oparcie można montować z dwóch stron w zależności od tego, z której strony chcemy podłokietnik.

Jeśli masz jakieś wątpliwości skontaktuj się z profesjonalistą aby zmontował dla Ciebie Kate.

3 Korzystanie z ławeczki prysznicowej

**PRZESTROGA**

Ryzyko obrażeń

- Należy zachować ostrożność podczas dotykania w bardzo wysokich i niskich temperaturach (na ostrym słońcu, mrozie, w saunie itp.)
- W przypadku wystąpienia wad, należy powstrzymać się przed używaniem Kate.

- Upewnij się, że taboret stoi zawsze na równej powierzchni.
- Przed użyciem, czy wszystkie przyssawki ściśle przylegają do powierzchni, a wszystkie cztery nogi są tej samej długości.

Maksymalna waga użytkownika ławeczki prysznicowej wynosi 150 kg.

3.1 Wysokość siedziska

Aby ustawić odpowiednią długość nóg:

1. Należy nacisnąć przycisk zatraskowy i wysunąć ruchomą część do odpowiedniej długości.
2. Przed używaniem upewnij się, że przycisk wskoczył z powrotem prawidłowo w otwór.
3. Należy powtórzyć czynność przy każdej nodze.

4 Konserwacja

Uchwyty Kate można czyścić i dezynfekować za pomocą zwykłych domowych środków czyszczących. Należy unikać stosowania żrących substancji, które mogą powodować przebarwienia.

Wysoka jakość warstwy wierzchniej zapewnia optymalną ochronę przed korozją. W przypadku uszkodzenia warstwy wierzchniej poprzez zadrapanie lub w inny sposób należy zlecić wyspecjalizowanemu sprzedawcy naprawę powierzchni.

4.1 Przewidziany czas życia

Ławeczka prysznicowa została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu go przez średnio 5 lat.